

Destinataires : Utilisateurs des appareils CoaguChek Pro II, chef de service SAD

Date : 26 novembre 2024

Objet : Mesure de l'INR en urgence sur appareil CoaguChek non contrôlé

Madame, Monsieur,


L'équipe EBMD a constaté l'utilisation du test en urgence (stat) sur l'appareil Coaguchek et ce, même suite à un échec de contrôle de qualité effectué précédemment. Nous désirons vous rappeler que les bonnes pratiques sont de **reprendre immédiatement** le/les niveaux de contrôle en échec et de ne pas effectuer de test chez le patient avant d'avoir réussi le contrôle de qualité.

Rappel :

Au passage des solutions de contrôle, s'assurer d'obtenir l'indication «**PASS**». Le résultat «**Fail**» s'affiche lorsque le CQ interne est en **échec**.

À ce moment, si vous essayez de poursuivre pour faire un test patient malgré l'échec ou si les CQ mensuels n'ont pas été faits, l'appareil vous avisera d'un problème CQ de ces façons :

1. Lorsque vous tentez d'accéder au test Patient, l'indication **QC!** apparaîtra sur le bouton pour vous aviser d'effectuer le contrôle de qualité avant de poursuivre (Image 1).
2. Si vous décidez de poursuivre et sélectionnez «Test patient», l'appareil vous montrera une fenêtre QC status -1 ou -2 (Image 2).
3. Si vous décidez d'ignorer cette alerte et de poursuivre avec le crochet vert, l'appareil ouvre le menu du test patient en vous indiquant qu'il procède à un **test en urgence** (Image 3). N. B Le CoaguChek est configuré pour n'offrir qu'un seul test en urgence, pouvant être utilisé dans des cas exceptionnels, mais **jamais lors d'un échec de CQ**. Lorsque le «test Urg» est utilisé, il est demandé d'effectuer les contrôles de qualité dès le retour en CLSC pour s'assurer de la validité des résultats émis.

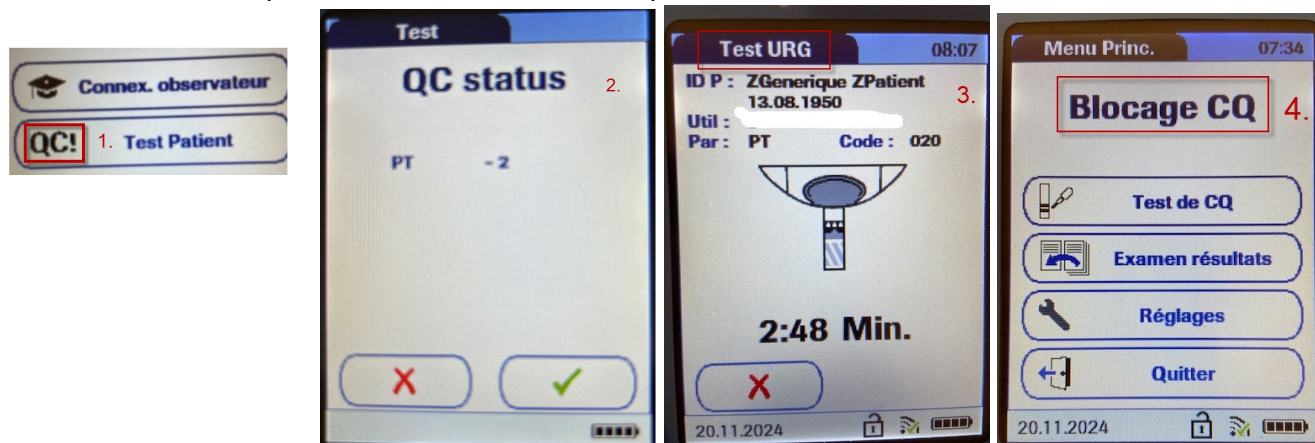

4. Enfin, lorsque le test urgent a été utilisé, le CoaguChek indiquera «Blocage CQ», car aucun autre test patient ne sera permis avant d'avoir effectué et réussi les contrôles de qualité.

Nous vous rappelons que poser une action clinique à partir d'un résultat d'analyse obtenu sur un appareil non contrôlé peut avoir des conséquences importantes pour l'utilisateur, par conséquent, nous vous demandons de porter une attention particulière à cette situation pouvant survenir lors de l'utilisation du CoaguChek Pro II.

Pour toutes questions, vous pouvez en tout temps communiquer avec l'équipe EBMD par courriel au ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Mélissa Léveillé, PhD, DEPD, CSPQ
Biochimiste clinique
Responsable des EBMD pour le CEMTL
OPTILAB Montréal-CHUM