

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal



☐ IUSMM ☒ Hôpital Maisonneuve Rosemont ☒ Hôpital Santa Cabrini Ospedale

NOTE

Destinataires: Utilisateurs de bandelettes urinaires en EBMD,

Chefs d'unité ou de service - Utilisateur de bandelettes urinaires (EBMD).

Date: 21 janvier 2024

Objet: Nouvelle version disponible de l'abrégé d'utilisation du test de grossesse

Alere en EBMD

Madame, Monsieur,

L'équipe EBMD désire vous informer qu'une nouvelle version (V.7) de <u>l'abrégé d'utilisation du Test de</u> <u>grossesse Alere en EBMD</u> est disponible. De ce fait, veuillez détruire toute copie imprimée des versions antérieures à cette nouvelle version. Se référer à la procédure d'utilisation complète OA 71988 au besoin.

Modifications effectuées à la version 7 :

- Inscrire la date d'ouverture sur la trousse de test et la mention « CIQ conformes ou Ok » afin de pouvoir mieux documenter que les contrôles internes de qualité ont été faits à l'ouverture de la boite. L'inscription dans le formulaire électronique est toujours requise.
- Inscrire de la date d'ouverture (et non de péremption) sur chaque bouteille de solutions CIQ.
- Envoi labo si urine avec présence de sang franc ou fortement colorée.
- Mise à jour des liens vers les formulaires de contrôles internes de qualité et le formulaire EBMD EST10077 disponible via le Répertoire des EBMD.
- Mesure de la densité urinaire à effectuer si le résultat du test de grossesse est négatif :
 - Pour Salle d'opération, cliniques externes de gynécologie et médecine nucléaire : effectuer la densité urinaire.
 - o **Pour les départements autres que ceux mentionnés ci-haut** (ex. : services courants, médecine familiale, clinique ITSS), la densité urinaire est maintenant **facultative**.
- Ajout de l'inscription : « En cas d'un résultat douteux, reprendre le test avec un prélèvement sanguin ou refaire l'analyse 3 à 7 jours plus tard ».
- Retrait de la double vérification du résultat par un autre utilisateur certifié.

Enfin, nous profitons de cette communication pour vous rappeler que toute la documentation relative à l'utilisation des Examens de Biologie Médicale Délocalisés (EBMD) est disponible via les pages intranet respectives de la section <u>Formations en ligne</u> ou directement via le <u>Répertoire des EBMD</u>. Il est recommandé de se référer à la documentation disponible **en ligne** plutôt que d'en faire l'impression, ceci vous assurant de toujours visualiser la dernière version des documents.

Pour toute question, vous pouvez joindre l'équipe EBMD par courriel au : ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Cordialement,

Dre Mélissa Léveillé, Biochimiste Clinique responsable des EBMD CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal Grappe OPTILAB Montréal-CHUM

CEMTL-EBMD-DOC-319610 Page 1 sur 1