

NOTE DE SERVICE


- Destinataires :** Tous les médecins
Tout le personnel infirmier
Tous les chefs d'unité
- Expéditeurs :** Valérie Gazemar, conseillère cadre en soins infirmiers-volet soins de plaies
Mayari Linares, conseillère en soins infirmiers-volet soins de plaies
Nicole Ta, conseillère en soins infirmiers-volet matériel et équipement de soins
- Date :** Le 16 juillet 2019
- Objet :** Nouveau Pico- Lancement Pico 7
-

Bonjour,

La gamme de thérapie par pression négative de Smith and Nephew de type *Pico* a été améliorée. Le remplacement vers ces nouveaux appareils se fera progressivement.

Les modifications apportées sont uniquement à propos du boîtier. Les principales nouveautés sont la présence d'indicateurs de fuite, de changement du pansement et de pile faible. L'indicateur clignotera de couleur orange pour indiquer le problème. De plus, une agrafe de ceinture sera disponible, ce qui facilitera le port du Pico 7.

La pression négative thérapeutique administrée est toujours de - 80 mm Hg. L'indication et la technique d'application demeurent inchangées, de même que les codes GRM.

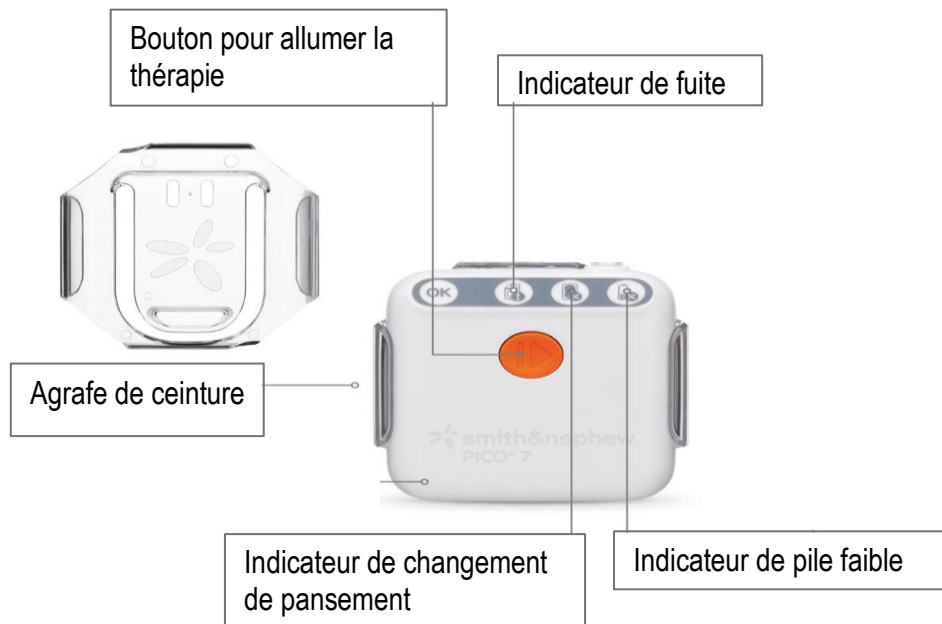

Explication des voyants lumineux

Le voyant lumineux vert "OK" clignote.
La pompe fonctionne correctement, la pression est préréglée.



Le voyant lumineux orange "Fuite d'air" clignote.

Une fuite d'air importante a été détectée; voir la section "Dépannage" ci-dessous.



Le voyant lumineux vert "OK" et le voyant lumineux orange "Piles faibles" clignotent.

La pompe fonctionne correctement, mais les piles sont faibles.



Le voyant lumineux orange "Saturation du pansement" clignote.

Le pansement est saturé ou le filtre est bloqué. Le TPPN n'est pas en cours.

Communiquez avec votre infirmière ou votre médecin pour remplacer le pansement saturé par un nouveau pansement.



Communiquez immédiatement avec une infirmière ou un médecin dans les cas suivants :

Vous constatez un changement dans la couleur ou le volume du liquide dans le pansement.

Par exemple :

- Le liquide passe de limpide à trouble ou à rouge vif.
- Le pansement devient rapidement saturé de sang.
- Votre plaie est plus rouge que d'habitude et il s'en dégage une mauvaise odeur.
- La peau autour de la plaie paraît rougie ou irritée.
- Le pansement semble plutôt lâche.
- Vous ressentez une douleur.
- Le voyant lumineux clignote sans arrêt.

Merci de votre collaboration.