

## Note de service

- Destinataires :** Gestionnaires et personnel en soins infirmiers CIUSSS-EMTL, médecins
- Expéditrices :** Conseillères en soins infirmiers – matériel et équipements de soins, DSI  
Sabrina Primiano, cheffe de service qualité et sécurité en soins infirmiers (par intérim), DSI
- Date :** Le 28 décembre 2022
- Objet :** Rupture de stock temporaire pour les pansements «Opsite post-op visible»
- 

Bonjour,







Nous éprouvons présentement une rupture de stock sur toute la gamme de produits «Opsite post-op visible» (OPOV) utilisée principalement comme pansement chirurgical spécialisé. Le produit substitut retenu est le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm 3M.

Voici une photo du pansement que nous utilisons habituellement :



Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les informations sur les codes GRM concernés et les produits substitués correspondants. Il est à noter que les grandeurs proposées diffèrent de celles du pansement original.



<b>Code GRM</b>	<b>Description du produit habituel</b>	<b>Code produit actuel</b>	<b>Substitut retenu (produit de 3M)</b>	<b>Photo du substitut</b>
2000045513	PANSEMENT POST-OP ABS N/ADH IMPERMÉABLE A/BORDURE ADH 8X10CM	185-66800136	90801 OVALE 11 X 12,7CM	
2000024991	PANSEMENT CHIR POST-OP VISIBLE ABS N/ADH IMP A/BORDURE ADH 10X15CM	SN66800137	90803 OVALE 14 X 16CM	
<b>Code GRM</b>	<b>Description du produit habituel</b>	<b>Code produit actuel</b>	<b>Substitut retenu (produit de 3M)</b>	<b>Photo du substitut</b>
2000021466	PANSEMENT CHIR POST-OP VISIBLE ABS N/ADH IMP A/BORDURE ADH 10X20CM	185-66800138	90815 9 X 25CM	
2000021467	PANSEMENT CHIR POST-OP VISIBLE ABS N/ADH IMP A/BORDURE ADH 10X25CM	185-66800139	90815 9 X 25CM	
2000021468	PANSEMENT CHIR POST-OP VISIBLE ABS N/ADH IMP A/BORDURE ADH 10X30CM	185-66800140	90817 9 X 35CM	
2000021469	PANSEMENT CHIR POST-OP VISIBLE ABS N/ADH IMP A/BORDURE ADH 10X35CM	185-66800141	90817 9 X 35CM	

Veillez prendre note des recommandations suivantes pour l'application du pansement acrylique :

- ✓ Ne jamais couper la compresse d'acrylique.
- ✓ Pour bien choisir la grandeur adéquate du pansement :
  - L'entièreté de la plaie doit être couverte par la compresse d'acrylique.
  - La compresse doit dépasser d'au moins 1 cm la plaie chirurgicale.

Le pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm 3M est un pansement qui peut rester en place au-delà de 7-10 jours. Par contre, pour une utilisation post opératoire temporaire, nous allons maintenir les directives actuelles indiquées dans les OIP. S'il est souhaité de garder le pansement acrylique en place pour 21 jours, une prescription médicale sera requise.

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à [conseilleres\\_mat equip\\_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:conseilleres_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca).

Merci de votre collaboration.