

Note de service

- Destinataires :** Médecins, gestionnaires, personnel infirmier, nutritionnistes et inhalothérapeutes de toutes les unités de soins.
- Expéditeurs :** Radouane Mnie Filali, CCSI - volet évaluation du matériel et équipement de soins - Direction des soins infirmiers
Valérie Darisse, conseillère en soins infirmiers - volet méthodes de soins informatisées - Direction des soins infirmiers
- Date :** 11 juillet 2023
- Objet :** Amélioration et ajout d'accessoires pour le tube nasogastrique de type Salem **ENFit^{MC}**

Bonjour,

L'année dernière, nous avons procédé à un virage **ENFit^{MC}** pour tous nos systèmes d'alimentation entérale afin de répondre aux dernières lignes directrices émises par la *Global Enteral Supplier Association (GEDSA, 2020)* et la *Norme Internationale ISO (ISO 80369)* pour des connexions sécuritaires du système d'alimentation. Toutefois, plusieurs enjeux ont été rapportés par les équipes cliniques en lien avec la connexion au sac de drainage, ainsi que l'usage de la prise d'air au niveau des TNG de type SALEM. Pour y remédier, nous avons suivi les recommandations du fabricant en ajoutant des accessoires.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principaux accessoires qui permettent une utilisation adéquate et sécuritaire de ces TNG :

Nom de l'accessoire	Photo de l'accessoire	Utilisation souhaitée
La valve de Lopez GRM : 2000085499		1-Valve anti-retour pour tube entérale. 2-Permet une connexion sécuritaire avec le sac de drainage, lors d'une décompression par gravité. 3-Permet l'administration des médicaments via le port dédié. 4-Permet la fermeture du drainage post administration des médicaments à l'aide du robinet et évite l'utilisation de la pince hémostatique.



<p>Pince coulissante (clamp bleu) GRM : 2000007809</p>		<p>Lorsque la succion n'est pas requise, cette dernière permet de clamper la tubulure bleue (prise d'air) le TNG - Salem fonctionne ainsi comme un Levine.</p>
--	---	--

Pour de plus amples informations en lien avec ces ajustements, nous vous invitons à consulter les outils cliniques mis à votre disposition, et ce, via notre page intranet volet matériel et équipements de soins en suivant le lien : [Standards de produits et de matériel de soins \(rtss.qc.ca\)](http://Standards de produits et de matériel de soins (rtss.qc.ca)) > *Tube nasogastrique et accessoires alimentation entérale.*

Merci pour votre habituelle collaboration.