

réception+opération+entretien

**MEDU** Flex  
Labvet

# TABLE DES MATIÈRES



---

Responsabilité de l'utilisateur . . . . .	3
Équipements de séries et optionnels. . . . .	4
Réception, inspection et assemblage. . . . .	5
Vue assemblé . . . . .	7
Assemblage des accessoires en option . . . . .	8
Vue assemblé avec équipement optionel . . . . .	10
Moduflex Labvet avec 3 sorties patients. . . . .	11
Garantie et Contact . . . . .	12
Pièces de remplacement . . . . .	13

**Nous recommandons de lire ce manuel avant l'utilisation de cet équipement. Porter une attention spéciale aux précautions et avertissements.**

- Ce produit fonctionnera conformément à la description contenue dans ce manuel d'opération, lorsque assemblé, opéré, maintenu et réparé selon les instructions fournies.
- Ce produit doit être vérifié périodiquement.
- Un produit défectueux ne doit pas être utilisé.
- Toute pièce défectueuse, usée, manquante ou contaminée doit être remplacée immédiatement.
- Advenant la nécessité d'effectuer un remplacement ou une réparation, Dispomed recommande qu'une demande soit placée par téléphone ou par écrit à un centre de service autorisé de Dispomed.
- Le remplacement de pièces d'entretien doit être effectué selon les instructions écrites fournies par Dispomed.
- Aucune modification au produit ne peut être effectuée sans le consentement écrit de Dispomed.
- L'utilisateur de ce produit aura la seule responsabilité pour tout mauvais fonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien, d'une altération ou d'une réparation mal effectuée par du personnel non autorisé par Dispomed.

Appareil d'anesthésie vétérinaire pour circuit ouvert conçu spécialement pour la recherche. Unité très compacte et portable en forme de "H" occupant très peu d'espace sur un comptoir de plus l'unité s'insère facilement dans la majorité des hottes de ventilation de laboratoire.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Débitmètre d'oxygène gradué de 0.1 à 4 lpm avec flotte rotative.
- Système SELECTATEC<sup>MD</sup> pour installation rapide de l'évaporateur.
- Boyau d'oxygène de 3 mètres (9').
- Coude gaz frais.
- 1 mètre (3,28') de Boyau gaz frais avec la Moduflex Labvet Standard, 3 mètres (9.84') de Boyau gaz frais avec la Moduflex Labvet avec 3 sorties patients.
- Garantie 5 ans.

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Adaptateur de circuit Bain.
- Appareil compatible MRI.
- Jusqu'à 3 sorties patients.

# INSTRUCTIONS

## RÉCEPTION, INSPECTION ET ASSEMBLAGE

**MODU**Flex

Certaines composantes de votre Moduflex Labvet doivent être assemblées avant l'utilisation.

### RÉCEPTION

Afin de réduire à un minimum les dommages qui pourraient se produire pendant le transport, votre Moduflex Labvet a été emballée dans une boîte spécialement conçu pour l'appareil.

### INSPECTION

Sur réception et lors du déballage, inspecter la boîte d'expédition afin de vous assurer qu'aucun dommage dû au transport ne se soit produit. Vérifier votre liste d'emballage afin de vous assurer que toutes les composantes sont incluses.




DISPOMED

# INSTRUCTIONS

## RÉCEPTION ET ASSEMBLAGE

**MODU**Flex

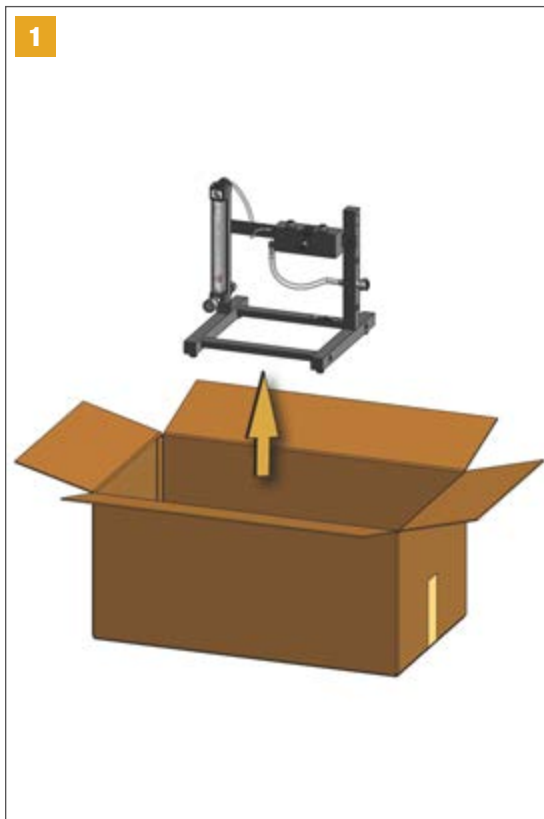


Retirer l'appareil de la boîte.



Installer le boyau d'oxygène (optionnel) à l'arrière de l'appareil en utilisant 2 clés ajustables afin de réduire la possibilité de débranchement accidentel du boyau. Brancher ensuite l'autre extrémité du boyau à la source d'oxygène de 50 l.p.c (p.s.i.) (3 bars).


  
DISPOMED

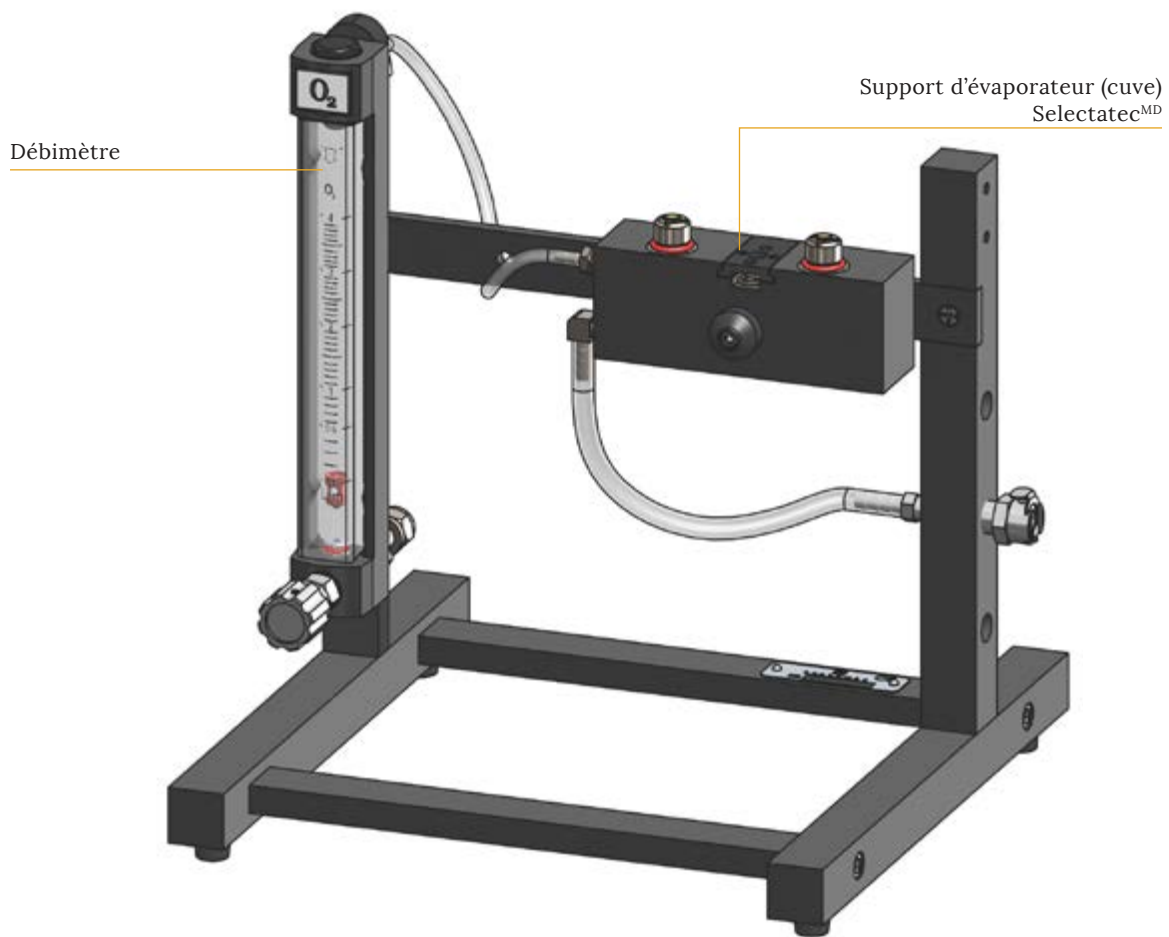

# ASSEMBLAGE

## DES ACCESSOIRES EN OPTION

**MODU**Flex

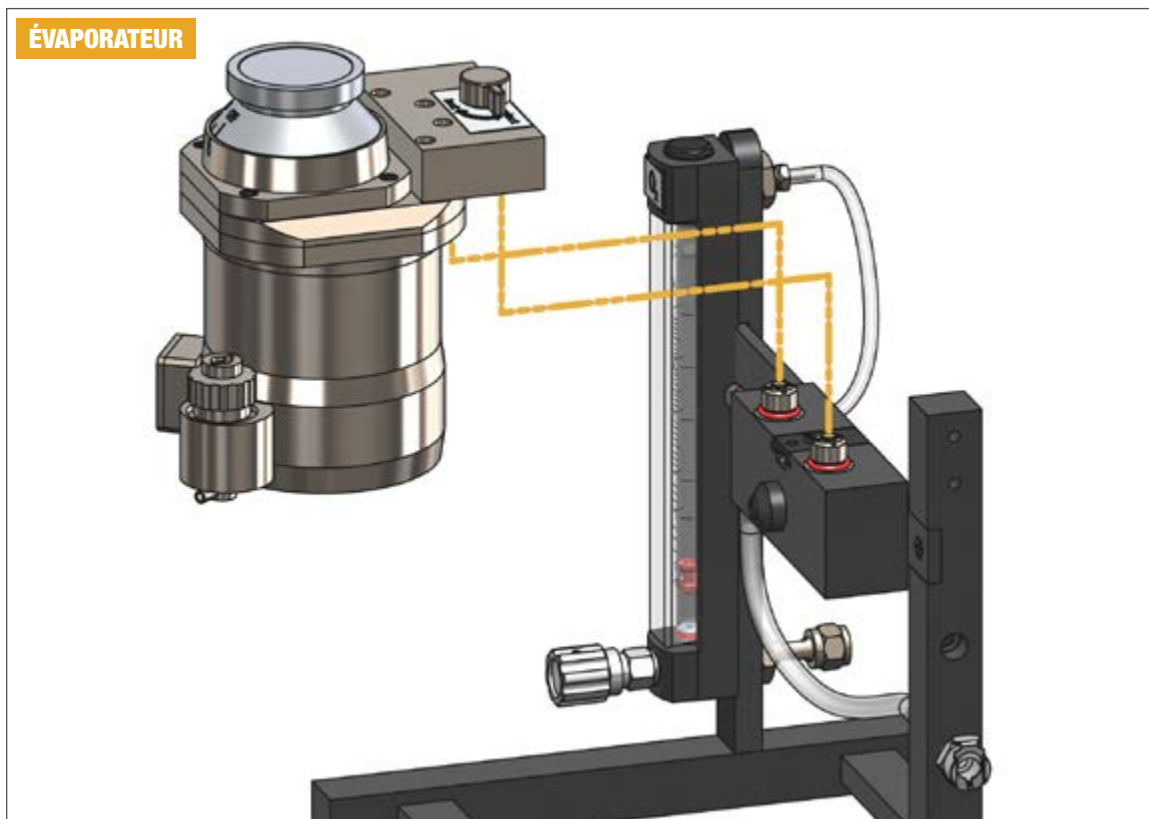


Installez l'évaporateur tel qu'illustré et verrouillez-le à l'aide du mécanisme de l'évaporateur.

**IMPORTANT :** Pour des instructions d'installation plus détaillée, se référer au manuel de l'option.



### INTERFACE D'ÉVACUATION DES GAZ

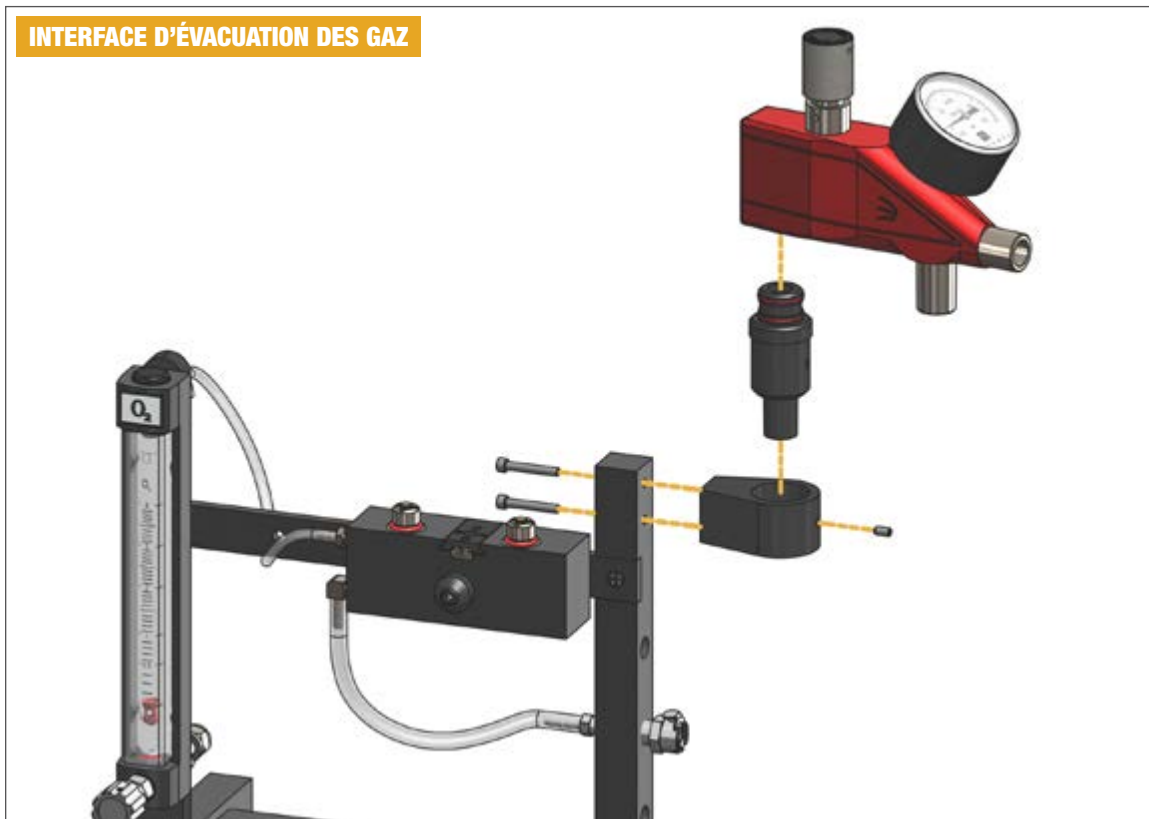


Installer l'adaptateur de circuit Bain telle qu'illustrée.

Un circuit ouvert de type "Bain" sur l'appareil d'anesthésie vous fait bénéficier d'un meilleur contrôle lors des interventions vétérinaires. Le ballon étant toujours gonflé, nul besoin d'attendre que celui-ci ait atteint une certaine grosseur avant de ventiler le patient.

**IMPORTANT** : Pour des instructions d'installation plus détaillée, se référer au manuel de l'option.

**VUE**  
ASSEMBLÉ AVEC OPTIONS

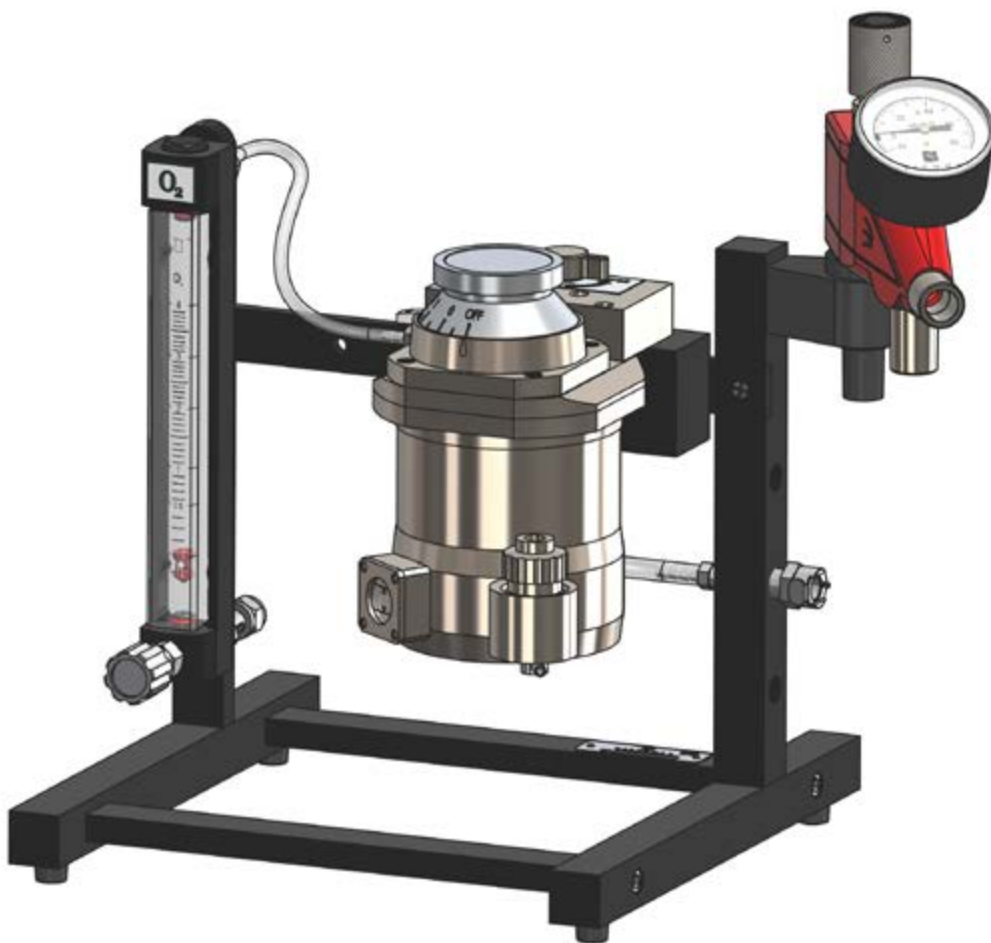


# MODUFLEX LABVET

## AVEC 3 SORTIES PATIENTS

#975-3300-000



**Attention:** Lorsque l'appareil est équipée de l'option 3 circuits, la sortie des gaz frais du bas doit toujours être utilisée. Les deux autres sorties sont munies d'un clapet automatique afin de prévenir les fuites lorsqu'elles ne sont pas en fonction.

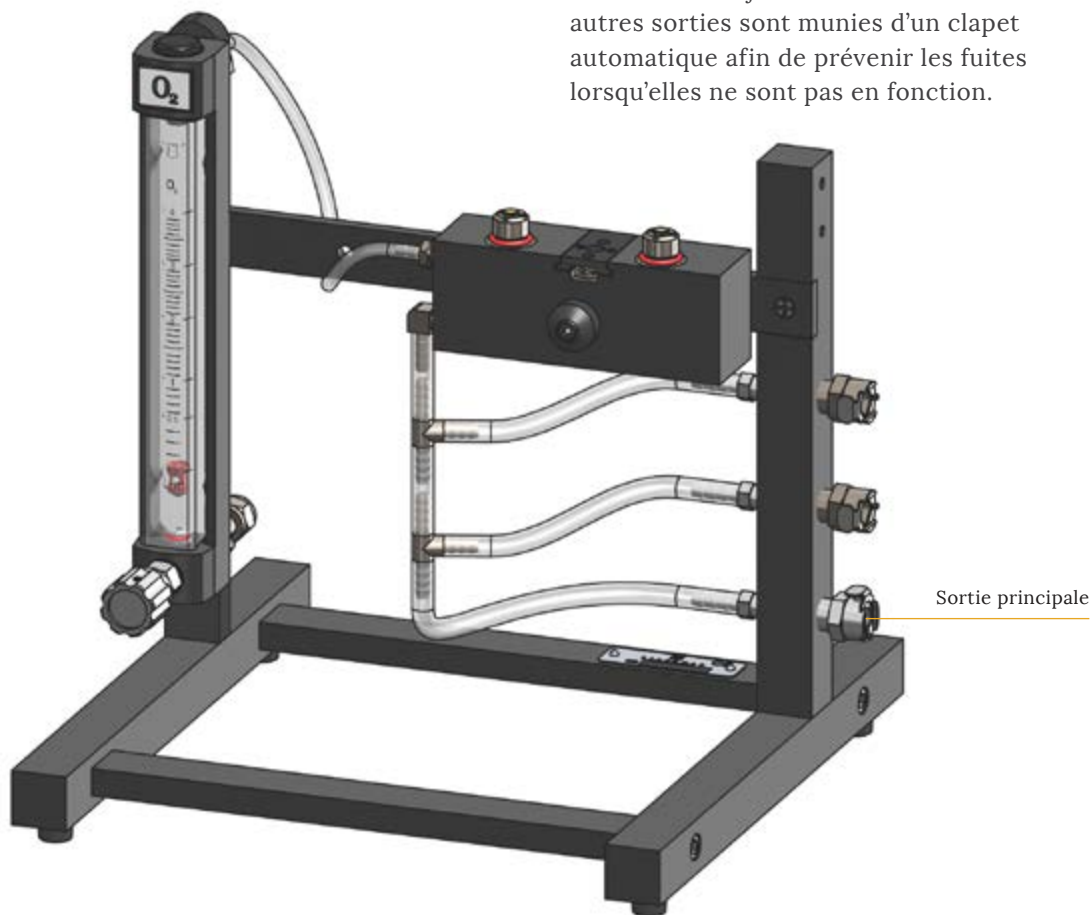

Dispomed Ltée garantit les appareils d'anesthésie Moduflex contre tout défaut de fabrication pendant une période de cinq (5) années suivant la date de livraison au client à la condition qu'ils soient utilisés conformément à leur notice d'emploi et que l'entretien prescrit soit effectué.

Dispomed Ltée ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage, blessure ou perte consécutif à l'utilisation d'un de ses appareils, attribuable ou non à une défaillance de celui-ci, s'il :

1. Est endommagé ou utilisé à mauvais escient;
2. A été réparé ou modifié par une personne autre qu'un membre du personnel de Dispomed ou un technicien de service agréé de Dispomed;
3. N'a pas été installé selon les directives de Dispomed ou en conformité avec les codes et règlements applicables;
4. A été nettoyé avec de l'alcool ou autre produit dommageable.

La garantie sur les composantes en plastique et en caoutchouc ainsi que sur les fournitures se limite aux seules défaillances observées au moment de la livraison au client.

Tout appareil défectueux sera, à l'entière discrétion de Dispomed, réparé ou remplacé. Dispomed Ltée se dégage de toute responsabilité quant à la détérioration, l'usure ou un usage abusif de ces appareils. La présente garantie sera nulle et non avenue pour tout appareil dont le numéro de série aura été modifié, défiguré ou effacé.

Les frais de transport relié au remplacement ou réparation d'équipement seront payés par le client. Des appareils de prêt sont disponibles pendant la durée des réparations. Contacter votre représentant(e) pour les modalités et conditions liées à ces prêts.

## **CENTRE DE SERVICE ET D'INFORMATION**

T: 1 800 363-1746

T: 1 450 759-9395

F: 1 450 759-8181

Email: [info@dispomed.com](mailto:info@dispomed.com)

Website : [www.dispomed.com](http://www.dispomed.com)

blogue : [www.info-vet.com](http://www.info-vet.com)

Facebook : [www.facebook.com/dispomed](http://www.facebook.com/dispomed)


Twitter : [twitter.com/Dispomed\\_fr](http://twitter.com/Dispomed_fr)

Youtube : [www.youtube.com/dispomedvet](http://www.youtube.com/dispomedvet)



# PIÈCES DE REMPLACEMENT

**MODU**Flex

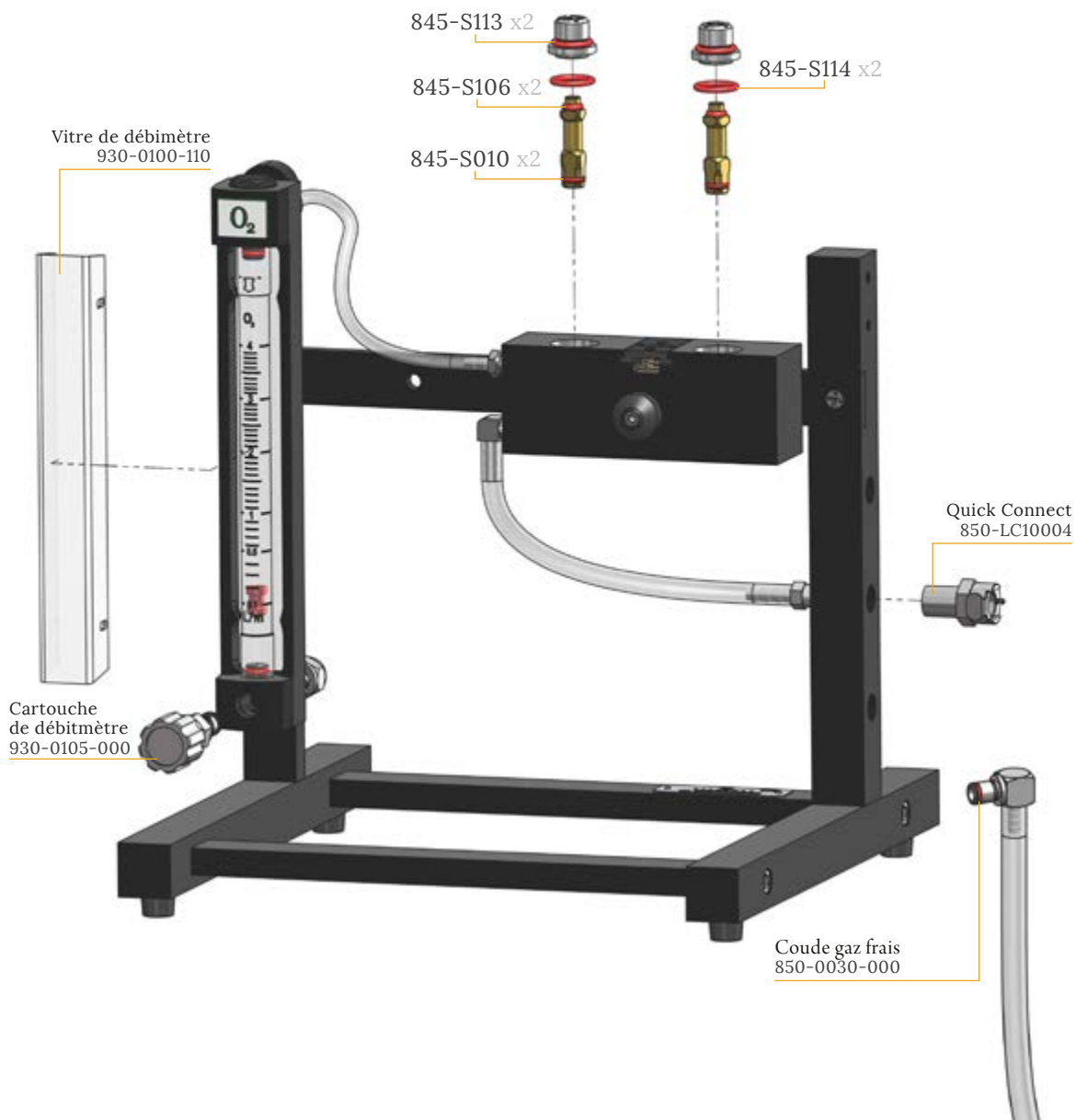

# MEDU Flex

---

## Fabriqué par Dispomed Itée

745 Nazaire-Laurin Joliette (QC) Canada J6E 0L6  
T : 1-800-363-1746 (Canada et États-Unis seulement)  
T : 1-450-759-9395  
Fax : 1-450-759-8181

[info@dispomed.com](mailto:info@dispomed.com)  
[www.dispomed.com](http://www.dispomed.com)

