



D
I
S
P
O
M
E
D

réception+opération+entretien

MIDU Flex
NRB

MIDU Flex
NRB

TABLE DES MATIÈRES



Responsabilité de l'utilisateur	3
Équipements de séries et optionnels.	4
Réception, inspection et assemblage.	5
Vue assemblé	9
Assemblage des accessoires en option	10
Vue assemblé avec équipement optionel	13
Moduflex NRB Avec 3 sorties patients.	14
Garantie et Contact	15
Pièces de remplacement	16

Nous recommandons de lire ce manuel avant l'utilisation de cet équipement. Porter une attention spéciale aux précautions et avertissements.

- Ce produit fonctionnera conformément à la description contenue dans ce manuel d'opération, lorsque assemblé, opéré, maintenu et réparé selon les instructions fournies.
- Ce produit doit être vérifié périodiquement.
- Un produit défectueux ne doit pas être utilisé.
- Toute pièce défectueuse, usée, manquante ou contaminée doit être remplacée immédiatement.
- Advenant la nécessité d'effectuer un remplacement ou une réparation, Dispomed recommande qu'une demande soit placée par téléphone ou par écrit à un centre de service autorisé de Dispomed.
- Le remplacement de pièces d'entretien doit être effectué selon les instructions écrites fournies par Dispomed.
- Aucune modification au produit ne peut être effectuée sans le consentement écrit de Dispomed.
- L'utilisateur de ce produit aura la seule responsabilité pour tout mauvais fonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien, d'une altération ou d'une réparation mal effectuée par du personnel non autorisé par Dispomed.

De façon à répondre aux besoins des vétérinaires travaillant avec les petits animaux, ou aux centres de recherche avec des petits rongeurs ou encore ceux qui utilisent un circuit ouvert (Bain), Dispoméd a développé le Moduflex Compact NRB.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Débitmètre d'oxygène gradué de 0.1 à 4 lpm avec flotte rotative.
- Chasse d'oxygène encastrée prévenant ainsi toute activation accidentelle.
- Conçu pour pouvoir accepter plusieurs modèles d'évaporateur (cuve).
- Support d'évaporateur (cuve) intégré à la tête de l'appareil.
- Conçu pour recevoir un adaptateur de circuit Bain.
- Système SELECTATEC^{MD} permettant une installation rapide de l'évaporateur.
- Base roulante sur cinq roues.
- Soupape d'évacuation des gaz avec fonction momentanée.
- Boyau d'oxygène de 3 mètres (9').
- Boyau gaz frais de 1 mètre (3,28').
- Coude gaz frais.
- Garantie 5 ans.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Support pour petite bonbonne d'oxygène
- Adaptateur de circuit Bain
- Débitmètre d'oxygène 0-1 lpm
- Alarme de circuit
- Interface d'évacuation
- Unité murale
- Appareil compatible MRI
- Jusqu'à 3 sorties patients

INSTRUCTIONS

RÉCEPTION, INSPECTION ET ASSEMBLAGE

MODUFlex

Certaines composantes de votre Moduflex NRB doivent être assemblées avant l'utilisation.

RÉCEPTION

Afin de réduire à un minimum les dommages qui pourraient se produire pendant le transport, certaines composantes ont été démontées de l'appareil. Ces composantes sont emballées séparément dans la boîte d'expédition.

INSPECTION

Sur réception et lors du déballage, inspecter la boîte d'expédition afin de vous assurer qu'aucun dommage dû au transport ne se soit produit. Vérifier votre liste d'emballage afin de vous assurer que toutes les composantes sont incluses.



DISPOMED

INSTRUCTIONS

RÉCEPTION ET ASSEMBLAGE



Retirer la base de la boîte et glisser le poteau noir, le côté en forme de cône dans la base.



Retirer les accessoires du sac qui est dans la grande boîte.



INSTRUCTIONS

RÉCEPTION ET ASSEMBLAGE



Retirer la tête de l'appareil de la boîte et glisser la sur le dessus du poteau noir (il y a un trou sous le support de la tête). Visser la vis de sécurité à l'arrière de la tête en utilisant la clé fournie.



Installer le boyau d'oxygène à l'arrière de l'appareil en utilisant 2 clés ajustables afin de réduire la possibilité de débranchement accidentel du boyau.

INSTRUCTIONS

RÉCEPTION ET ASSEMBLAGE

MODUFlex



Brancher l'autre extrémité du boyau à la source d'oxygène de 50 l.p.c (p.s.i.) (3 bars).



DISPOMED



ASSEMBLAGE

DES ACCESSOIRES EN OPTION

MODUFlex

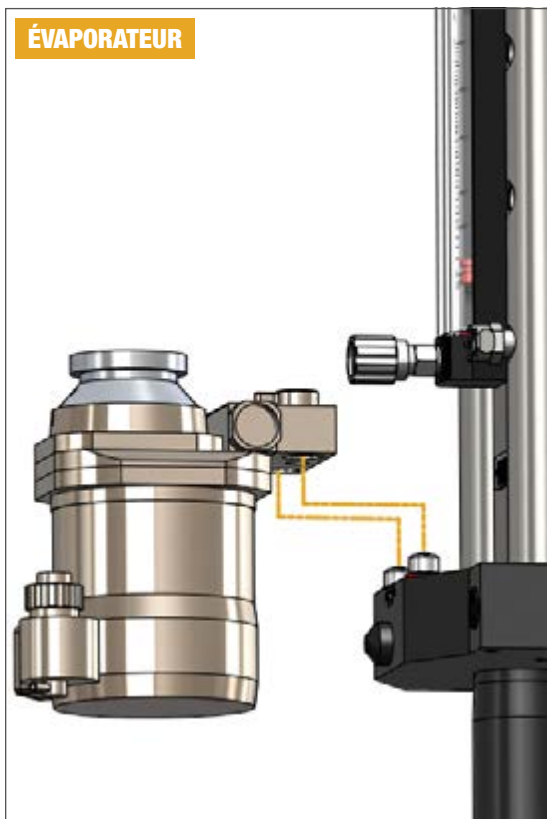

Installez l'évaporateur tel qu'illustré et verrouillez-le à l'aide du mécanisme de l'évaporateur.




Installer l'interface d'évacuation telle qu'illustrée.

Lors d'une chirurgie, tous les gaz non consommés par l'animal doivent être envoyés à l'extérieur pour éviter que ceux-ci soient respirés par le personnel de la clinique. Branchée avec un ventilateur d'évacuation, l'interface d'évacuation contrôle le débit de succion automatiquement afin de le maintenir équilibré avec la quantité de gaz non utilisée.

IMPORTANT : Pour des instructions d'installation plus détaillée, se référer au manuel de l'option

ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES EN OPTION

MODUFlex

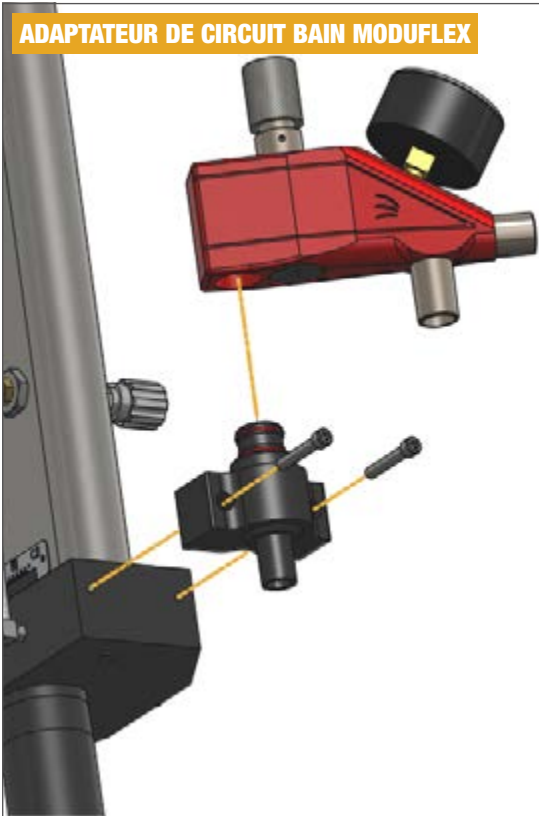

Installer l'adaptateur de circuit Bain telle qu'illustrée.

Un circuit ouvert de type "Bain" sur l'appareil d'anesthésie vous fait bénéficier d'un meilleur contrôle lors des interventions vétérinaires. Le ballon étant toujours gonflé, nul besoin d'attendre que celui-ci ait atteint une certaine grosseur avant de ventiler le patient.



Installer le support de bonbonne tel qu'illustré.

Le support de bonbonne peut vous dépanner dans plusieurs situations. En effet, il peut s'avérer très utile lors d'un manque d'oxygène du système central. Lors des cas occasionnels où vous devez déplacer un animal anesthésié dans une pièce qui n'est pas munie de prise d'oxygène, le support de bonbonne permet de garder le patient dans une condition idéale.

IMPORTANT : Pour des instructions d'installation plus détaillée, se référer au manuel de l'option

ASSEMBLAGE

DES ACCESSOIRES EN OPTION



Installer le bras mural tel qu'illustré.

IMPORTANT : Pour des instructions d'installation plus détaillée, se référer au manuel de l'option



MODUFLEX NRB

AVEC 3 CIRCUITS PATIENTS



Attention: Lorsque l'appareil est équipée de l'option 3 circuits, la sortie des gaz frais du bas doit toujours être utilisée. Les deux autres sorties sont munies d'un clapet automatique afin de prévenir les fuites lorsqu'elles ne sont pas en fonction.



Dispomed Ltée garantie les appareils d'anesthésie Moduflex contre tout défaut de fabrication pendant une période de cinq (5) années suivant la date de livraison au client à la condition qu'ils soient utilisés conformément à leur notice d'emploi et que l'entretien prescrit soit effectué.

Dispomed Ltée ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage, blessure ou perte consécutif à l'utilisation d'un de ses appareils, attribuable ou non à une défaillance de celui-ci, s'il :

1. Est endommagé ou utilisé à mauvais escient;
2. A été réparé ou modifié par une personne autre qu'un membre du personnel de Dispomed ou un technicien de service agréé de Dispomed;
3. N'a pas été installé selon les directives de Dispomed ou en conformité avec les codes et règlements applicables;
4. A été nettoyé avec de l'alcool ou autre produit dommageable.

La garantie sur les composantes en plastique et en caoutchouc ainsi que sur les fournitures se limite aux seules défaillances observées au moment de la livraison au client.

Tout appareil défectueux sera, à l'entière discrétion de Dispomed, réparé ou remplacé. Dispomed Ltée se dégage de toute responsabilité quant à la détérioration, l'usure ou un usage abusif de ces appareils. La présente garantie sera nulle et non avenue pour tout appareil dont le numéro de série aura été modifié, défiguré ou effacé.

Les frais de transport relié au remplacement ou réparation d'équipement seront payés par le client. Des appareils de prêt sont disponibles pendant la durée des réparations. Contacter votre représentant(e) pour les modalités et conditions liées à ces prêts.

CENTRE DE SERVICE ET D'INFORMATION

Tél: 1 800 363-1746

Tél: 1 450 759-9395

Fax: 1 450 759-8181

Courriel : info@dispomed.com

Site internet : www.dispomed.com

blogue : www.info-vet.com

Facebook : www.facebook.com/dispomed


Twitter : twitter.com/Dispomed_fr

Youtube : www.youtube.com/dispomedvet




PIÈCES DE REMPLACEMENT

MODUFlex

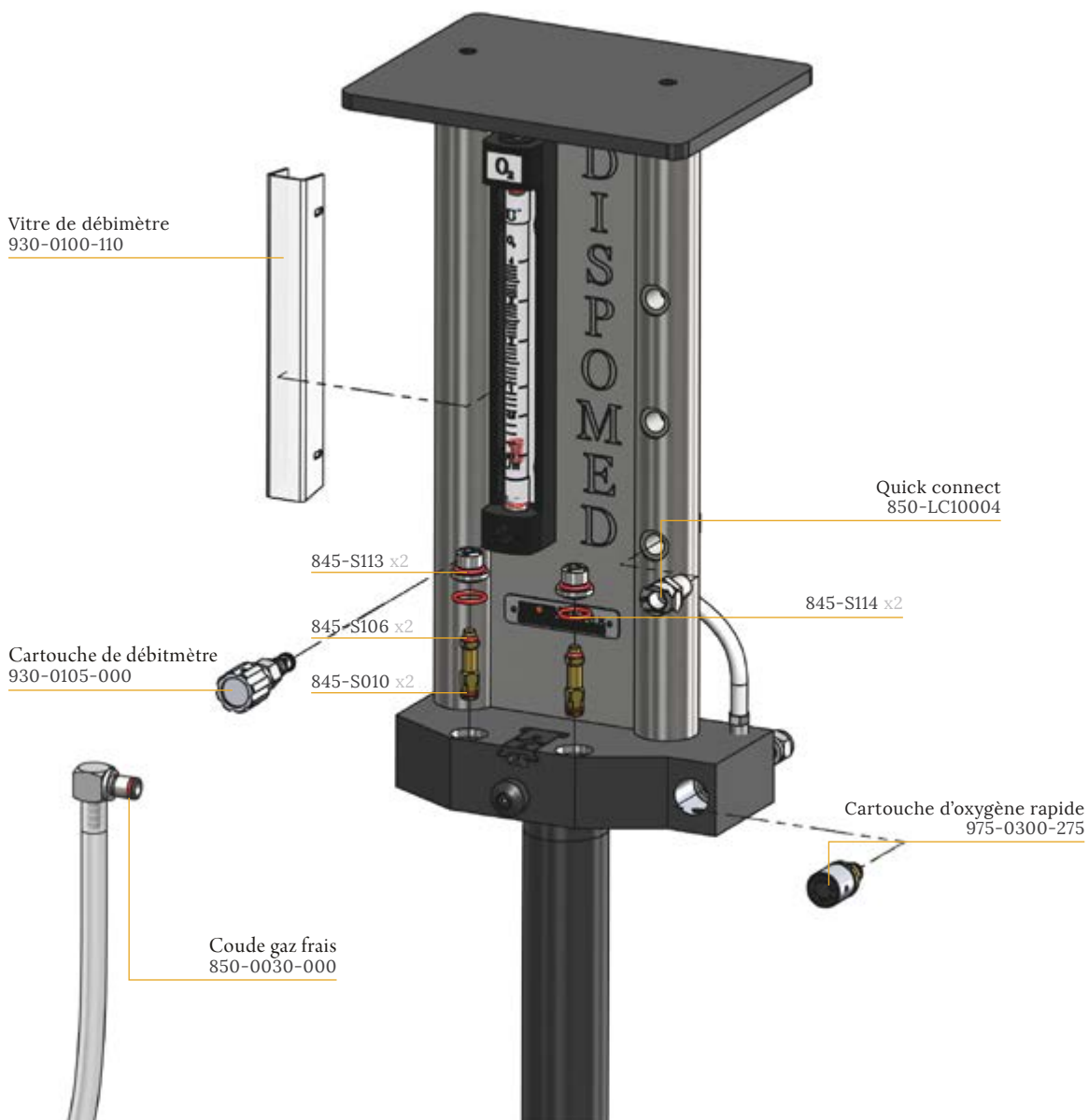

PIÈCES DE REMPLACEMENT

MODUFlex

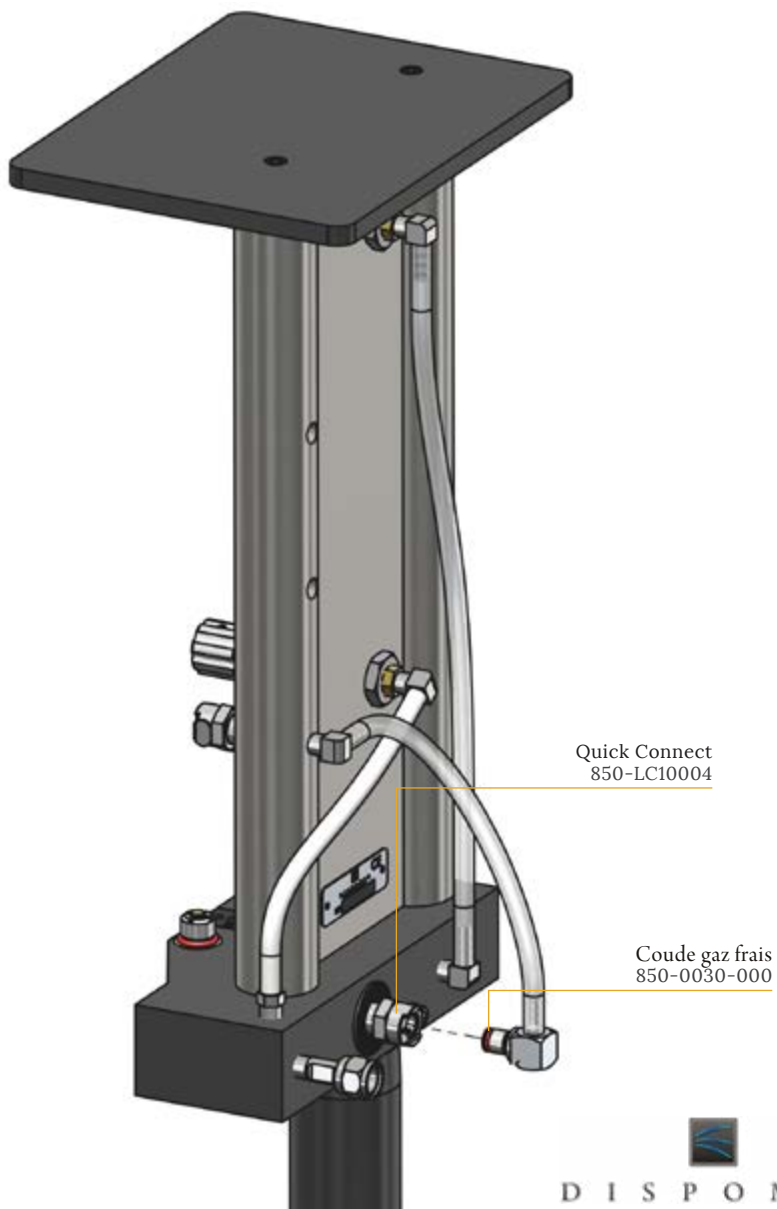

MEDU Flex

Fabriqué par Dispomed Itée

745 Nazaire-Laurin Joliette (QC) Canada J6E 0L6
T : 1-800-363-1746 (Canada et États-Unis seulement)
T : 1-450-759-9395
Fax : 1-450-759-8181

info@dispomed.com
www.dispomed.com

