

# Rapport d'entretien préventif

<b>Balance pédiatrique</b>	<b>SERVICE</b>	CAR2009 - clinique lymphocytes et CAR-T
Marque	DETECTO SCALE CO	Date
Modèle	750	No. GBM
No. Série	E20914-0084	No. SR
		2026-05-13
		801012 - 22057
		1286509

## I Inspection générale

Réussite Échec

- 1.1 Inspection physique de la balance et nettoyage
- 1.2 Vérification du transformateur / batterie
- 1.3 Vérification de la mise au niveau
- 1.4 Vérification de l'afficheur / pavé numérique/ boutons de contrôles
- 1.5 Vérification du poids "zéro"

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

## II Vérification de la calibration

2.1 Vérification avec poids étalon			
Poids lest	0,0kg	1,0kg	2,0kg
Valeur mesuré	0,0kg	1,0kg	2,0kg
Déviations entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg

Poids lest	5,0kg	10,0kg	20,0kg
Valeur mesuré	5,0kg	10,0kg	20,0kg
Déviations entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg

\* Tolérance de  $\pm 0.1\text{kg}$

## III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Poid 20kg	Poid 10kg	Poid 2kg	Poid 1kg
No GBM	82061-1	82064-1	68767	70355
Certifié par	CovLab	CovLab	CovLab	CovLab
No de certification	00019C901261RK	00019C801260RK	000137B073501.1	000140809950RK
Échéance du certificat	2028-01-31	2028-01-31	2027-03-31	2027-04-09

## IV Commentaire

## V Techniciens GBM

Titre

/ Technicien GBM

FOSSUO TALOM Hermann / Électromécanicien

©PS