

Rapport d'entretien préventif

Pèse-Personne SERVICE Recherche Clinique

Marque	<u>HEALTH O METER MEDICAL</u>	Date	<u>2025-01-10</u>
Modèle	<u>597KL</u>	No. GBM	<u>801089</u>
No. Série	<u>597T016052</u>	No. SR	<u>1266290</u>

I Inspection générale

Réussite Échec

- 1.1 Inspection physique de la balance et nettoyage
- 1.2 Vérification de la mise au niveau
- 1.3 Vérification de l'afficheur / pavé numérique/ boutons de contrôles
- 1.4 Vérification du poids "zéro"

✓	
✓	
✓	
✓	

II Vérification de la calibration

2.1 Vérification avec poids étalon

Poids lest	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Valeur mesuré	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Déviati on entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg	0,0kg

Poids lest	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Valeur mesuré	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Déviati on entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg

* Tolérance de ±0.1kg

2.2 Vérification du stadiomètre

Poids lest	90,0cm	180,0cm
Valeur mesuré	90,2cm	180,4cm
Déviati on entre référence	0,2cm	0,4cm

* Aucune tolérance disponible

III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Poids 20kg
No GBM	82061
Certifié par	Covariance
No de certification	000111:636641RK
Échéance du certificat	2025-12-31

IV Commentaire

V Techniciens GBM

Titre

Paul Savard

/ Technicien GBM

PS 2025-1-10

/