


## MASQUE DE PROCÉDURE

# Comment le mettre et le retirer


### COMMENT METTRE LE MASQUE

1. SE LAVER les mains avant de prendre un masque
2. PASSER les courroies derrière les oreilles
3. DÉPLIER le masque du nez jusqu'au menton
4. S'ASSURER que le masque adhère aux joues
5. MODELER la pince nasale à la forme du nez
6. SE RELAXER les mains

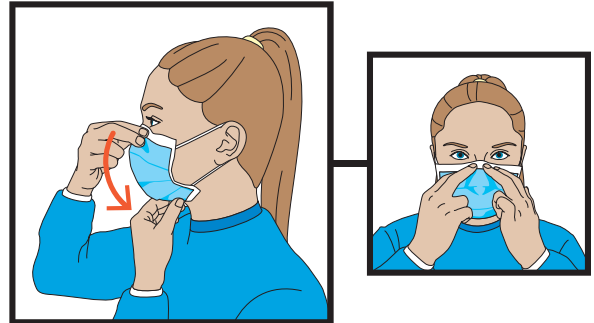

### COMMENT RETIRER LE MASQUE


1. SE LAVER LES MAINS puis retirer le masque en saisissant les courroies
2. SE RELAXER LES MAINS après avoir retiré le masque

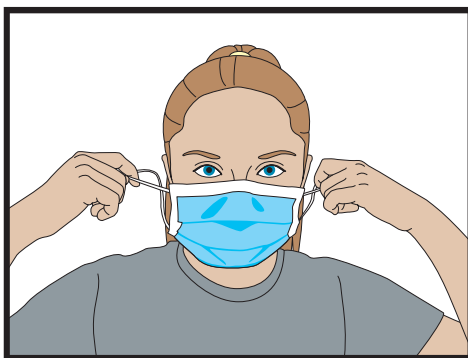

### ATTENTION !



NE PAS  
TOUCHER  
le masque

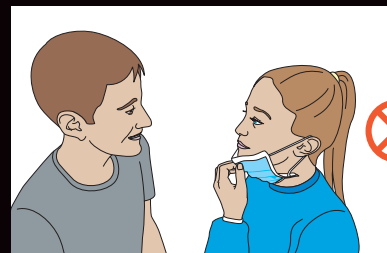

NE PAS  
RETIRER  
le masque  
pour parler  
avec une  
autre  
personne

### CHANGER DE MASQUE

- LORSQU'IL EST SOUILLÉ
- LORSQU'IL EST HUMIDE ET INCONFORTABLE
- SELON LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT