

Pompe de perfusion dédiée à la Résonance magnétique

IRadimed - Modèle 3860

Distribuée au Canada par **ROXON MEDI-TECH**

Isabelle Alain


Représentante médicale des ventes

(ialain@roxon.ca --- 514 248 3004)

Marche à suivre rapide pour la Mise en place de la Tubulure




1. **Très important** de procéder d'abord à l'Ouverture de la pompe.
2. Amorcer la ligne, retirer les bulles d'air.
3. Ouvrir la porte, coté A ou B, en appuyant vers le bas puis en tirant vers soi
4. Installer la tubulure. Vous guider avec les images ci-dessous. Refermer la porte.

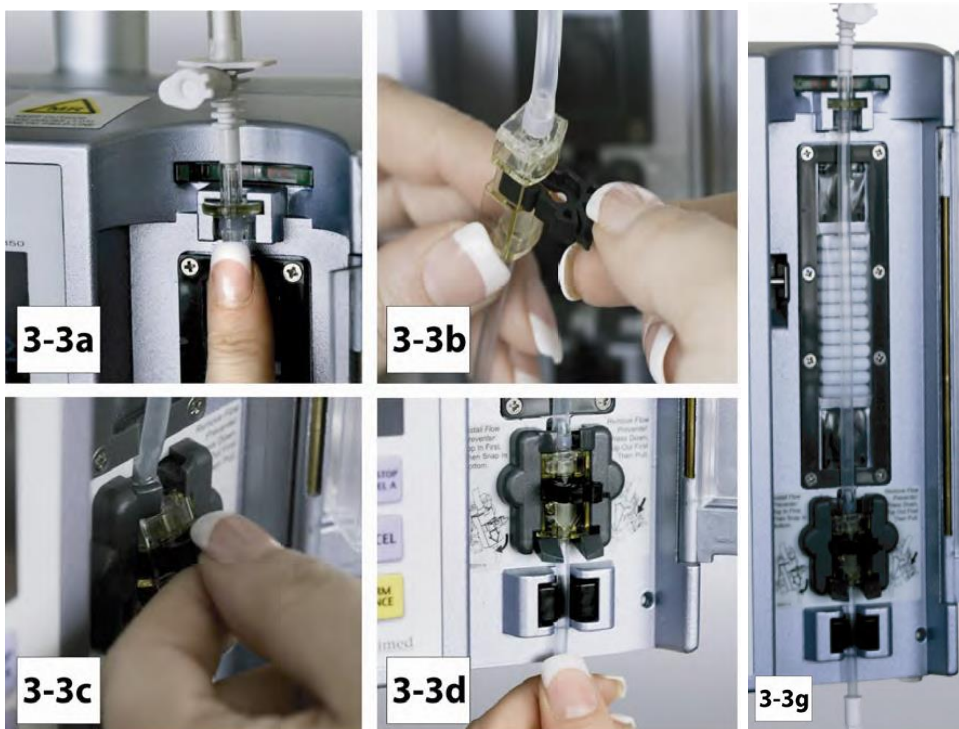

Pour retirer la tubulure

1. Retirer la partie du haut, la partie circulaire (référence 3-3a)
2. Retirer la tubulure introduite dans la partie basse (référence 3-3d)
3. À l'aide du pouce, appuyer vers le bas, sur la pièce noire pour la retirer.

Marche à suivre rapide pour débuter une Perfusion primaire (côté A)


1. Ouvrir la pompe. 
2. À l'écran d'accueil, Sélectionner Nouveau patient (New patient – Rate mode)
3. Utiliser les Touches programmables situées à gauche de l'écran pour Sélectionner le Débit (Rate). Utiliser le clavier numérique pour entrer le débit. (ci-dessous, 15 ml/hr)
4. Sélectionner VTBI (volume to be infuse ou volume à perfuser)
5. Installer la Tubulure tel que vu précédemment.

6. Débuter la perfusion en Appuyant sur 
7. S'assurer du bon fonctionnement de la perfusion (Voyant lumineux clignotant VERT)




Marche à suivre rapide pour débuter une Perfusion primaire (côté B)

1. Utiliser les Touches programmables situées à gauche de l'écran pour Sélectionner Channel B
2. Utiliser le clavier numérique pour entrer le débit et le volume à perfuser.







3. Démarrer la perfusion. 
4. S'assurer du bon fonctionnement de la perfusion (Voyant lumineux clignotant VERT)


Marche à suivre rapide pour l'Administration d'un Bolus

1. Utiliser les Touches programmables situées à gauche de l'écran pour Sélectionner Bolus
2. Utiliser le clavier numérique pour entrer le débit du Bolus et le volume du Bolus à perfuser.




3. Appuyer sur ENTER  pour débiter l'administration du Bolus
4. Une Alarme vous préviendra de l'administration terminée du Bolus
5. Vous serez de retour automatiquement à la perfusion primaire précédemment déterminée.

Marche à suivre rapide pour l'arrêt d'un Bolus

1. Une fois l'administration du Bolus en cours, pour l'interrompre, Appuyer sur  ou  (selon) 
2. Appuyer sur 
3. S'assurer que l'écran affiche désormais votre perfusion primaire à l'écran.
4. Redémarrer votre perfusion primaire en appuyant sur  

*** Si DEUX perfusions (côté A et B) se trouvent en fonction, BOLUS se trouve accessible en appuyant sur MENU . Bien sélectionner à cet écran, Bolus A ou B selon le cas.

Répondre à une ALARME (occlusion, présence de bulles ou autre)


1. **Toujours** Appuyer sur Alarme Silence 
2. Appliquer le correctif.
3. Redémarrer la perfusion, Coté A ou B (selon)  


Marche à suivre rapide pour l'usage du Saturomètre

1. Raccorder la sonde à fibre optique à l'arrière de la pompe de perfusion.



2. Effectuer correctement le branchement du capteur selon l'image ci-dessous.

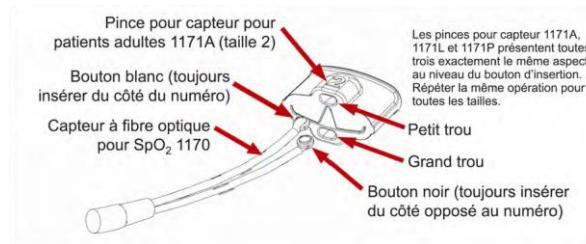

3. Votre lecture de Saturation et de pulsation apparaîtra automatiquement à l'écran :
 - a. En bas, si seulement une perfusion (côté A) est en fonction.
 - b. En haut, si deux perfusions (côté A et B) se trouvent en fonction.
4. Pour interrompre la pulsation audible
 - a. Sélectionner MENU
 - b. Choisir NEXT PAGE (avec les touches programmables situées à gauche de l'écran)
 - c. Choisir Saturation
 - d. Modifier, si désiré, les Alarmes de Haute et Basse Saturation
 - e. Choisir ENABLE TONE
5. Si le saturomètre est retiré, une Alarme retentira. (PROBE OFF)
6. Appuyer sur Alarme Silence 
7. Replacer le capteur au doigt ou choisir de le retirer tout simplement.

Marche à suivre pour Établir la communication entre la Pompe de perfusion et le Contrôleur à distance situé à l'extérieur de la chambre de résonance

1. Votre service possède DEUX pompes (identifiées Numéro 1 et Numéro 2)
2. Ouvrir la pompe.
3. **Ouvrir le Contrôleur à distance et Observer l'écran dès l'ouverture.**
4. Utiliser les Touches programmables situées à gauche de l'écran pour Sélectionner :
 - a. USE CHANNEL (nombre)
 - b. CHANGE CHANNEL
5. S'assurer de choisir le Channel correspondant au Numéro de la pompe en utilisation

*** Une fois que la communication vous semble bien établie, vous référez à votre document TEMPS D'ARRET pour vérification.

1. S'assurer qu'en tête de l'écran de votre Contrôleur à distance vous percevez le Symbole de l'Antenne et le Nombre correspondant au Numéro de votre pompe (ci-dessous, à l'Image 1, on peut voir le numéro 1)
2. S'assurer que votre pompe porte bien elle aussi, en en-tête, le Numéro 1 (voir Image 2)
3. Vous assurez que visuellement les deux écrans comportent les Mêmes informations.



IMAGE 1



IMAGE 2

