

# Note de service

- Destinataires :** Médecins, gestionnaires, personnel en soins infirmiers et nutritionnistes du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
- Expéditeur :** Service d'évaluation matériel et équipement de soins (DSI)
- Date :** Mardi 21 janvier 2020
- Objet :** Connexion ENFit pour alimentation entérale
- 

Bonjour,

Certains usagers venant d'autres établissements peuvent être porteurs d'une voie d'alimentation entérale (tube nasogastrique, gastrostomie, etc.) avec une connexion distale appelée ENFit.

Cet embout ENFit n'est compatible qu'avec du matériel ENFit qui a souvent un code de couleur mauve. L'utilisateur doit visser les deux parties pour assurer une connexion étanche.

Cela concerne :

- l'embout d'alimentation de la sonde (l'embout ballonnet, lorsque présent, reste inchangé);
- l'embout de la tubulure côté sonde;
- le port de médication;
- les seringues.



## CONNEXION ENFIT®



La seringue d'irrigation avec embout cathéter (code GRM 2000000418, voir illustration ci-dessous) n'est donc pas compatible.



Cependant, nos tubulures d'alimentation le sont, mais il faut dévisser le connecteur blanc distal au préalable.



En cas de besoin, vous pouvez commander la seringue d'alimentation ENFit de 60ml compatible via le code GRM : 2000074289.

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au (514) 252-3400 poste 5657 ou à l'adresse courriel : [conseilleres\\_mat equip\\_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:conseilleres_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca).

Merci de votre collaboration.