

Note de service

Destinataires : Utilisateurs du produit code GRM 4500000010

Expéditeur : Service d'évaluation du matériel et équipement de soins (DSI)
Service de prévention de promotion de la santé (DRHCAJ)

Date : Mardi 11 août 2020

Objet : Changement du contenant à objets piquants-tranchants de 1.4L, GRM 4500000010

Bonjour,

Suite à des incidents en lien avec le système de fermeture temporaire du contenant à objets piquants-tranchants de 1.4L de BD, code de produit 300460, code GRM 4500000010, et suite à l'évaluation de plusieurs remplaçants potentiels par nos services, nous avons retenu le contenant de 1L de BD code produit 367216.



Ancien contenant #300460



Nouveau contenant #367216

Le stock de l'ancien produit devra être écoulé par les unités qui n'utilisent pas la fermeture temporaire. Les autres unités (incluant le soutien à domicile) recevront le nouveau produit dès la prochaine commande.

Vous trouverez en annexe le guide d'utilisation du nouveau contenant.

Pour toute demande ou question, vous pouvez écrire à l'adresse courriel suivante : conseillers_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


Merci de votre précieuse collaboration.



Contenant à objets piquants-tranchants de BD

#367216 de 1L – GUIDE D'UTILISATION

Assemblage

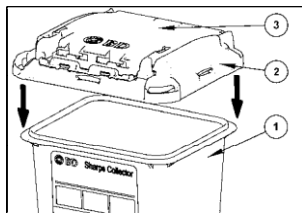


Placez la base du contenant (1) sur une surface plane avec l'étiquette « Biohazard » face à vous.


Alignez le couvercle (2) sur la base (1) avec la fermeture (3) orientée avec le logo BD vers l'avant, tel qu'illustré.

Appuyez fermement sur les 4 coins du couvercle pour assurer un assemblage sécurisé du couvercle à la base (un click doit être audible lorsque les loquets s'enclenchent).


Utilisation

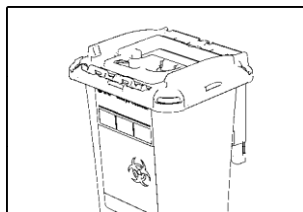

Pendant l'utilisation, la fermeture peut être verrouillée en position « toujours ouverte » à l'arrière du contenant ou en position « temporairement fermée » couvrant l'ouverture d'accès.

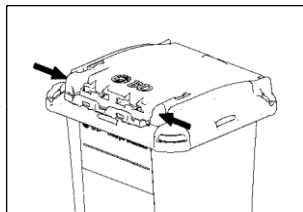

Pincez les 2 « ailettes latérales » en même temps, tel qu'illustré, et soulevez pour ouvrir le contenant lorsque la fermeture est en position « temporairement fermée ».

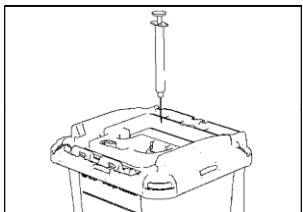


Attention! Avant utilisation, inspectez visuellement afin de s'assurer qu'aucun objet piquant-tranchant ne dépasse de l'ouverture.

Déposez les objets par « l'ouverture d'accès » avec la pointe piquante-tranchante orientée vers le bas, tel qu'illustré. Le contenant est plein lorsque le contenu atteint la « ligne de remplissage » sur l'étiquette.

Attention! Le fait de forcer ou de trop remplir le contenant peut entraîner des blessures graves.


Élimination

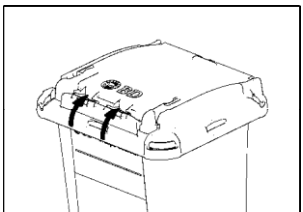

Rabattez le couvercle en position « fermeture temporaire » couvrant « l'ouverture d'accès », puis insérez le « verrou permanent » à l'avant, dans le couvercle en le faisant pivoter vers le haut puis en poussant vers l'arrière, tel qu'illustré, pour engager le verrouillage permanent (un click audible doit être entendu lorsque les loquets s'enclenchent).

Éliminez les contenants à objets piquants-tranchants selon la procédure établie.

Ports de retrait d'aiguille

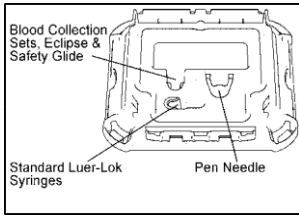


Ce contenant dispose de 3 « ports de retrait d'aiguille » spécifiques pour les seringues luer lock standards, les supports de prélèvement sanguin, les ensembles de prélèvement sanguins et les produits de sécurité BD tels que les aiguilles « BD Eclipse » ou « BD SafetyGlide » et les aiguilles BD de stylo injecteur.

Retrait d'aiguille


Le contenant doit être stable et posé à la verticale sur une surface dure pour pouvoir éliminer l'objet piquant-tranchant d'une main. Un support mural (le support BD #366201) est aussi disponible au besoin. Si l'aiguille ne peut pas être détachée du dispositif de manière sécuritaire, jeter l'ensemble, sans les détacher, dans le contenant.

Retrait d'aiguille standard

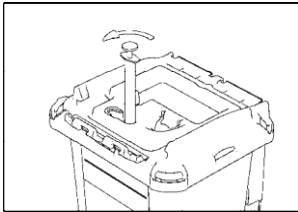


Insérez l'aiguille dans l'orifice de retrait de l'aiguille approprié, la pointe de l'aiguille en premier, et faites pivoter le dispositif (c'est-à-dire la seringue, le support de prélèvement sanguin etc.) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher l'aiguille du dispositif. Assurez-vous que l'aiguille se détache et tombe dans le contenant, tout en éloignant prudemment le dispositif du contenant.

Retrait d'aiguille avec système sécuritaire

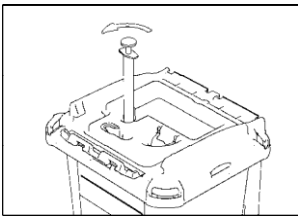

Insérez les aiguilles « Eclipse » ou « SafetyGlide » ou les ensembles de prélèvement sanguin sécuritaires dans l'orifice de retrait de l'aiguille approprié, la pointe de l'aiguille sécurisée en premier, et faites pivoter le dispositif (c'est-à-dire la seringue, le support de prélèvement sanguin etc.) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher l'aiguille du dispositif. Assurez-vous que l'aiguille se détache et tombe dans le contenant, tout en éloignant prudemment le dispositif du contenant.

Retrait d'aiguille de stylo injecteur

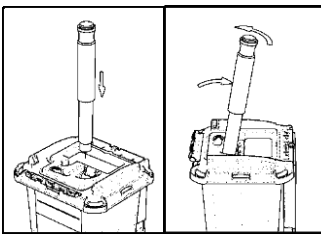

Ne pas recapuchonner l'aiguille du stylo injecteur. Insérez avec précaution le stylo, la pointe de l'aiguille en premier, dans le « port de retrait de l'aiguille du stylo injecteur » puis faites pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appliquant une légère force latérale pour maintenir la « base de l'aiguille » dans les rainures.

Conseils de sécurité



- Assurez-vous que le contenant soit correctement assemblé et ne soit pas endommagé avant utilisation.
- « L'ouverture d'accès » en haut doit être visible.
- Assurez-vous que « l'ouverture d'accès » est exempte d'objets piquants-tranchants avant de déposer d'avantage de déchets ou d'enclenchez la « fermeture temporaire ».
- Ne jamais introduire la main dans le contenant.
- Cessez d'utiliser le contenant lorsque le contenu atteint la ligne de remplissage.
- Le contenant est conçu pour un usage unique.

Adapté et traduit du document de BD : **OCDGPIN1520**