

Note de service

Destinataires : Tous les employés, gestionnaires et médecins du CIUSSS-EMTL



Expéditeurs : Conseillers en soins infirmiers - matériel et équipements de soins -
Direction des soins infirmiers

Date : Le 25 janvier 2022




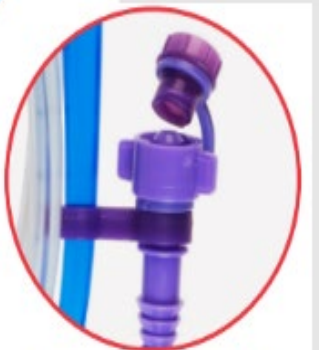

Objet : Introduction du nouveau système d'alimentation entérale avec raccord
ENFit®

Bonjour,

Veuillez prendre note qu'afin de répondre à la **Norme internationale ISO**, concernant les raccords des dispositifs médicaux utilisés pour la nutrition entérale, nous procédons à une transition vers un système d'alimentation entérale qui possède un raccord **ENFit®** et qui requiert l'utilisation d'une nouvelle seringue **ENFit®**. **Ce changement prendra effet dès le 14 février 2022 prochain.**

Produits actuels	Nouveaux connecteurs/produits ENFit®
 <p data-bbox="300 1543 795 1617">Connecteur (duotube, gastrostomie, jejunostomie) actuel</p>	 <p data-bbox="820 1543 1404 1617">Connecteur (duotube, gastrostomie, jejunostomie...) ENFit® Seringue ENFit®</p>
<p data-bbox="300 1633 1469 1722">Notez bien que les patients qui sont en hébergement et au soutien à domicile auront besoin des anciens adaptateurs et seringues jusqu'au prochain changement de leur stomie avec un produit Enfit.</p>	







Produits actuels	Nouveaux connecteurs/produits ENFit®
 <p data-bbox="300 714 792 787"><u>Tube nasogastrique de type Levine (principalement à HMR)</u></p>  <p data-bbox="300 1365 792 1438"><u>Tube nasogastrique de type Salem (principalement à Santa-Cabrini)</u></p>	  <p data-bbox="1177 1302 1429 1344">Connecteur ENFit^{MC}</p> <p data-bbox="868 1365 1429 1438">Tube nasogastrique de type Salem avec connecteur ENFit</p>
<p data-bbox="300 1438 1437 1543">Précision : Afin d'éviter tout reflux du liquide gastrique ou solution d'alimentation entérale, l'utilisation de la valve anti-reflux est requise au niveau de la prise d'air. Cette dernière peut être commandée sous le code GRM : 2000083401.</p> 	

La norme **ENFit**[®] signifie une connexion sécurisée unique pour l'administration par voie entérale, ce qui va permettre de réduire la fréquence des problèmes de branchement des sondes d'alimentation entérale, les seringues d'administration de médicaments, ainsi que d'autres dispositifs entéraux.

Des aide-mémoires ainsi que des vidéos seront bientôt disponibles en cliquant sur le lien, <http://intranetcemtl.cemtl.rtss.qc.ca/index.php?id=1586>, ou en vous référant au chemin suivant sur l'intranet : *Soins et services/Soins infirmiers/outils cliniques de la DSI*.

Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance du tableau ci-bas afin de visualiser les produits qui seront en circulation à partir de la date susmentionnée.

Nous vous remercions pour votre continuelle collaboration.

CODE GRM	DESCRIPTION GRM	CODE PRODUIT FOURNISSEUR	IMAGE
2000015603	ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR TUBE "PEG" 20FR (POUR GASTROSTOMIE PERCUTANÉE)	Z8884752042E	
2000079343 (Le code GRM change selon le diamètre de la sonde)	SONDE SALEM A/ CONNECTEUR ENFIT RADIOPAQUE STÉRILE 16 FR 48 PO	Z8888264960E	
2000083401	VALVE ANTIREFLUX SALEM	Z8888266197	
2000042655	NÉCESSAIRE IRRIGATION AVEC SERINGUE ENFIT	Z8884700108E	
2000083288	CONNECTEUR TRANSITION ENFIT	Z765000	