

Destinataires : Personnel infirmier USI - HMR et HSCO, tout le personnel utilisateur des pompes Spectrum IQ

Expéditeurs : Conseillers en soins infirmiers - Volet matériel et équipements de soins, DSI
Laetitia Royer - CCSI médecine spécialisée, DSI

Date : Le 17 mai 2022

Objet : Choix de tubulure pour les pompes Spectrum IQ

Bonjour,

Nous tenons, par la présente, à vous informer que suite à la recommandation des lignes directrices de l'association canadienne des accès vasculaires (CAVA, 2018), il est fortement recommandé d'utiliser des **tubulures sans sites d'injection ni soupapes anti-reflux** lors de l'administration, via pompes Spectrum IQ, des perfusions thérapeutiques de médicaments de niveau d'alerte élevé et de niveau de risque élevé.

Suite à cette recommandation, nous avons pris les mesures nécessaires, afin que vous soyez approvisionnés en tubulures sans sites d'injection ni soupapes anti-reflux. Vous pouvez, dès lors commander cette tubulure sous le code GRM :

CODE GRM	DESCRIPTION	CODE PRODUIT FOURNISSEUR
2000001541	TUBULURE PRIMAIRE 260CM SANS SITE INJECTION 2 PINCES ET VERROU LL 10GTES/ML	1C8109 

Le choix de la présente tubulure est aussi une recommandation du fournisseur des pompes Spectrum dans le but de pallier à l'enjeu des alarmes d'occlusion qui surviennent en amont de la pompe.

Nous vous remercions pour votre continuelle collaboration.

