

# JUXTA FIT

## PREMIUM & ESSENTIALS

### JAMBIÈRE STANDARD

## GUIDE D'APPLICATION RAPIDE

ÉTAPE 5: Ajuster le niveau de compression (au niveau prescrit, si applicable)



ÉTAPE 6 : Répéter l'étape 5 pour toutes les bandes



5713, ch. de la Côte-des-Neiges  
Montréal, QC, H3S 1Y7  
514.731.3378 Info@jslawner.com

Si une assistance supplémentaire est nécessaire, s'il vous plaît contacter le service client par téléphone au 1-800-361-3153 ou par courriel [service@valco.ca](mailto:service@valco.ca). Lorsque les bandes sont placées dans une position parallèle, ils doivent se chevaucher légèrement, sans laisser d'espace entre les bandes.

CircAid Medical Products, Inc. assumes no liability for injury or damages resulting from contraindicated use of its products. CircAid is a registered trademark. BPS and Juxta-Fit are trademarks of CircAid Medical Products, Inc. ©2012 CircAid Medical Products, Inc. All Rights Reserved.



◀ Aspect final

### ÉTAPE 1 :

Mettre le bas




### ÉTAPE 2 :

Mettre la chevillère



\* la chevillère peut être mise soit:  
sous la jambière Juxta-Fit™ ou  
sur la jambière Juxta-Fit™

### ÉTAPE 3 : Positionner la jambière

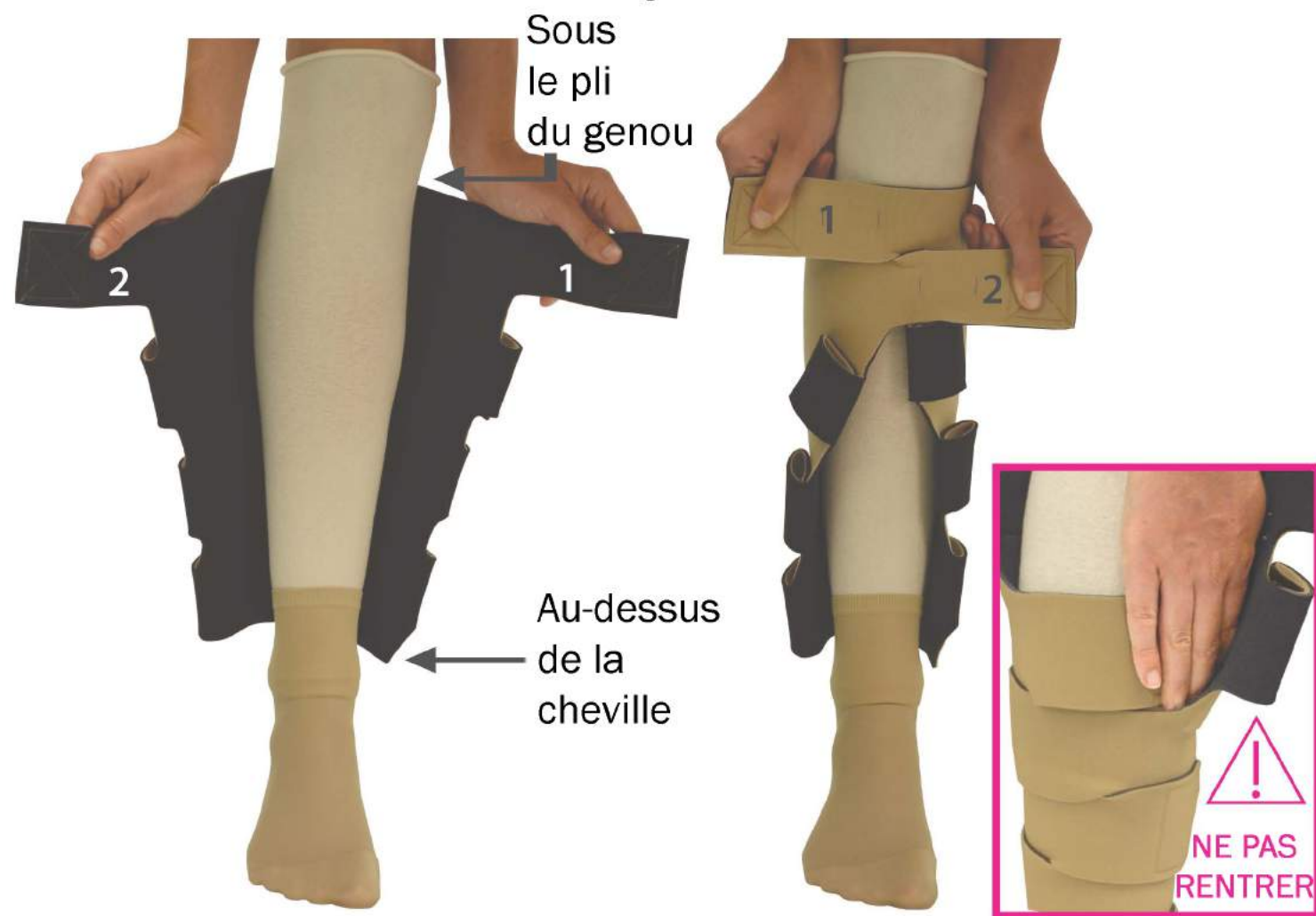

### ÉTAPE 4 : Appliquer les bandes

