



1. Mise en route

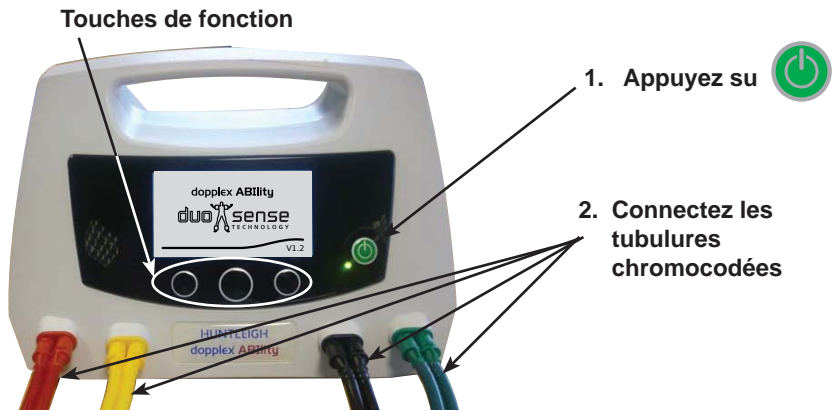

2. Réaliser une mesure



Appuyez sur pour passer à l'écran de mise en place des brassards.

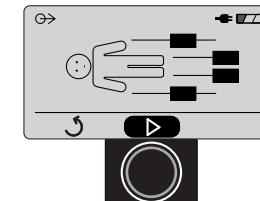

Placez les brassards sur le patient

Veillez noter ! Par souci de clarté, les illustrations suivantes montrent des membres sans vêtements. Des mesures peuvent être effectuées si les brassards sont placés sur des vêtements minces comme des collants, une chemise ou des chaussettes fines. Les brassards ne doivent pas être placés sur un pull ou un pantalon.


3. Mise en place des brassards

Préparation du patient - Mise en place des manchons de contrôle des infections à effet barrière

Bras



Jambe

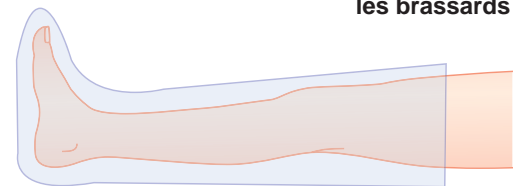

Remarque : Chassez l'air avant de serrer les brassards



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'infection croisée, il est recommandé de toujours utiliser les manchons fournis avec le dopplex Ability car ils fournissent une barrière de contrôle des infections.



AVERTISSEMENT : Ne pas appliquer le brassard directement sur une peau non intacte. En cas de plaie, assurez-vous qu'un pansement approprié est appliqué, accompagné d'un manchon de contrôle des infections à effet barrière.

Mise en place et positionnement des brassards


BRAS DROIT

ROUGE




BRAS GAUCHE

JAUNE

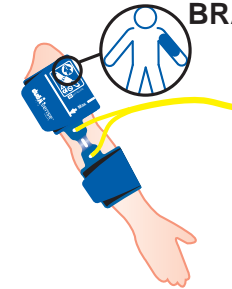


CHEVILLE DROITE

NOIR

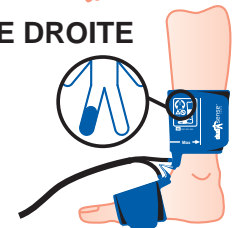

CHEVILLE GAUCHE


VERT

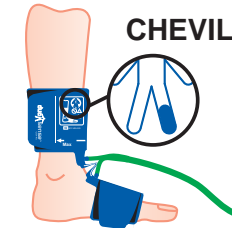

ATTENTION : Vérifiez le positionnement et l'alignement des brassards sur les membres du patient conformément aux instructions de mise en place. Assurez-vous que la boucle ne pince pas la peau du patient afin de ne pas lui occasionner de gêne ou de blessures. Un brassard mal positionné peut entraîner des erreurs de mesure.

4. Positionnement correct du brassard

Bras

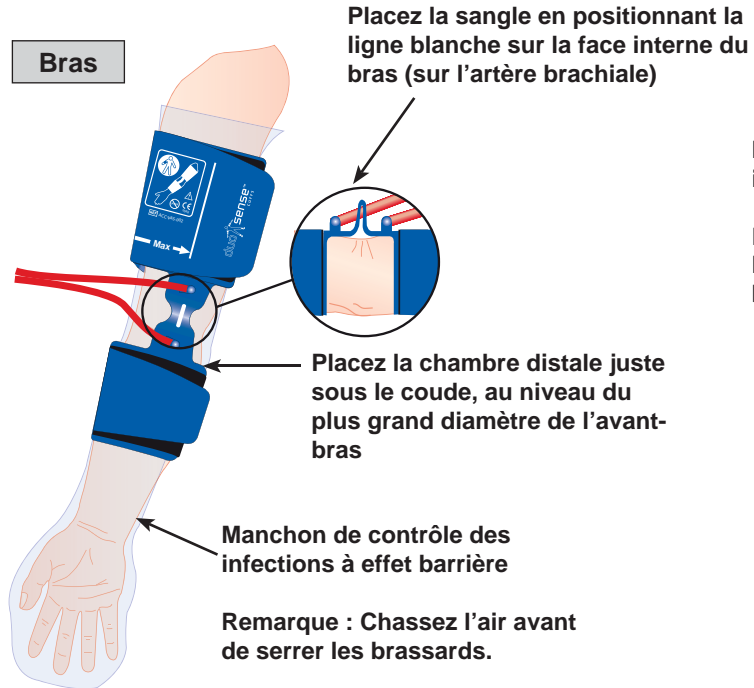


Manchon de contrôle des infections à effet barrière

Remarque : Chassez l'air avant de serrer les brassards.

Jambe/Pied


Assurez-vous que la sangle est placée sur le dessus du pied. (Sur l'artère tibiale antérieure)

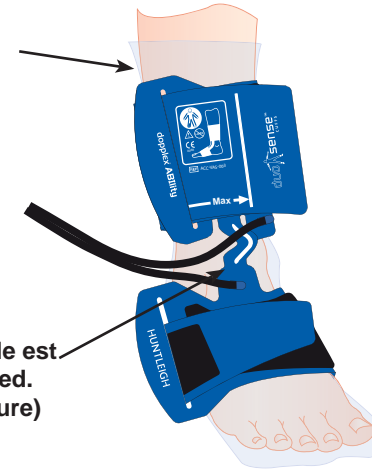

Remarque: Le patient doit être couché sur le dos, détendu, rester immobile et s'abstenir de parler, tousser, etc.


Remarque: Avant le test, expliquez toujours au patient que les brassards vont se resserrer et que le test durera environ 3 minutes.

Serrage du brassard

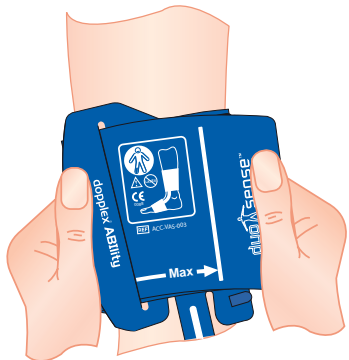

Tenez la boucle de la main gauche et tirez l'extrémité du brassard de la main droite pour serrer. **VEILLEZ À NE PAS TROP SERRER !**

Position du pied

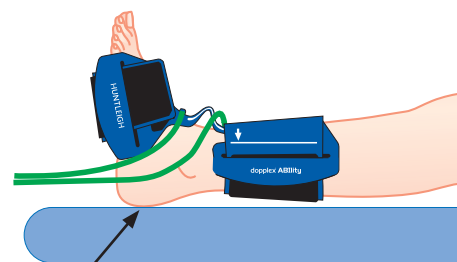


Assurez-vous que le talon du patient repose sur la table d'examen. Ne laissez pas la jambe reposer sur le brassard afin d'éviter toute altération du résultat de la mesure.


5. Positionnement incorrect du brassard



Une erreur de mesure pourrait se produire ou il pourrait s'avérer impossible de prendre une mesure correcte si les brassards ne sont pas correctement positionnés

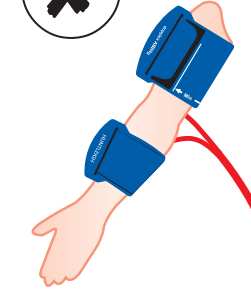

Assurez-vous que les brassards ne tournent pas autour du membre.

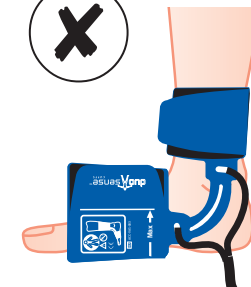

Assurez-vous que les brassards sont dans le bon sens.

Remarque: Vérifiez soigneusement que la tubulure n'est ni pliée ni obstruée d'aucune façon. Ne touchez ni les brassards ni la tubulure lorsque la mesure est en cours.





6. Réalisation du test




ATTENTION : Restez toujours avec le patient et surveillez la progression du test.

Appuyez sur  pour commencer la mesure.

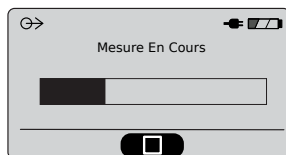


Remarque : Appuyez sur  pour arrêter le test à tout moment.

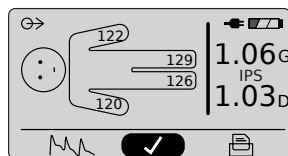

7. Pour arrêter le test à tout moment




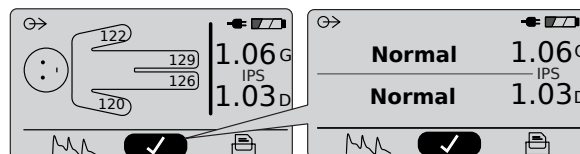
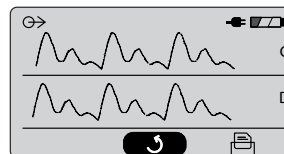
1. Les résultats sont affichés au bout de moins de 3 minutes .



2. Appuyez sur  pour imprimer les résultats.

3. Appuyez sur  pour afficher les courbes PVR.

4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent ou sur  pour imprimer les courbes PVR.

5. Appuyez sur  pour afficher l'interprétation de l'IPS



6. Appuyez sur  pour imprimer ou sur  pour démarrer un nouveau test.



ATTENTION : Considérez toujours la valeur de l'IPS sans vous limiter à l'interprétation afin de n'omettre aucun éventuel résultat marginal.



AVERTISSEMENT : Les pressions systoliques sont affichées à titre d'information uniquement et ne doivent pas être utilisées pour établir un diagnostic clinique.

HUNTLEIGH

 ...with people in mind

UNE SOCIÉTÉ ARJOHUNTLEIGH, MEMBRE DU GROUPE GETINGE

© et ™ sont des marques déposées de Huntleigh Technology Limited
Notre politique étant basée sur l'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans avis préalable.

CE
0088



Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office: ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF

© Huntleigh Healthcare Limited 2011

Huntleigh Healthcare Ltd. - Diagnostic Products Division
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 F: +44 (0)29 20492520
E: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
W: www.huntleigh-diagnostics.com



771477-4