



## SURVEILLANCES ET SOINS POUR PANSEMENT PREVENA<sup>MC</sup> PLUS



**Indication** : Pour incisions linéaires ou non et croisées de 20 cm à 90 cm

**Particularités** : Pansement sur mesure. Dispositif à usage unique, pression négative de -125 mm HG en continue. Piles rechargeable, brancher le dispositif tous les jours, durant la nuit. Aucun changement de pansement. Réservoir de 150 ml

### **Surveillances requises**

Aspect du pansement la mousse doit-être compressée en tout temps

- S'il a une fuite : la colmater avec une pellicule transparente (fourni dans la boîte) ou pellicule transparente style opsite. Vérifier l'intégrité de la tubulure (connecteur, blocage)
- Qualité, quantité exsudat : si le réservoir est plein , éteindre le dispositif, retirer le réservoir, le remplacer, repartir le dispositif par la suite.
- Signes d'infection : fièvre, rougeur, chaleur, œdème, douleur

### **Retirer le pansement après 7 jours :**

Éteindre la machine au préalable, déconnecter la tubulure de l'unité,  
Retirer le pansement dans le sens de l'incision, couvrir la plaie d'un  
pansement sec. Mettre le dispositif dans la boîte de récupération.

### **VÉRIFICATION AUX 8 HEURES**

S'assurer que l'unité de thérapie est en fonction

### **VÉRIFICATION AUX 2 HEURES**

Vérifier si présence d'alarme et prendre les mesures nécessaires,

S'assurer que l'éponge soit contractée sur l'incision chirurgicale,

Évaluer la qualité de l'exsudat.

**POUR TOUTE QUESTION CONTACTER le 514-252-3400 ext : 7629**

2018-01-24vg