

# RÉSUMÉ DES FONCTIONS D'INTELECONNECTEV

# Accéder à l'application

De l'intérieur du réseau CEMTL, l'application est disponible dans les **Applications HMR**. Dans les autres installations, l'application est accessible à partir d'**Applications Établissements**.





### Connexion

Le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** sont les mêmes que Windows, assurez-vous de bien faire attention aux majuscules.



Le Service de l'informatique (poste 5656) est responsable d'accorder les **jetons d'accès** pour la connexion à distance ou par mobile. Il s'occupe également du **mot de passe** si vous l'oubliez.


## Recherche de patients

Vous pouvez chercher un patient par le **numéro de dossier,** la **RAMQ** ou le **nom de famille** (minimum deux caractères). Il est aussi possible de restreindre les résultats en ajoutant la **date de naissance**.



Une autre méthode pour trouver un patient consiste à aller regarder dans la section Patients.

- Liste des derniers examens faits dans l'installation (Patients by location)
- Liste des patients à votre nom (My patients)

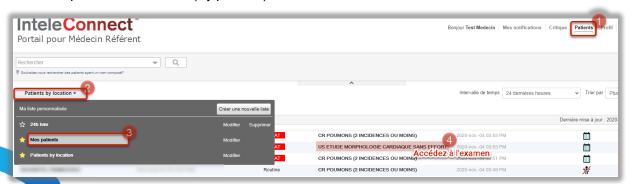



# Rapport d'examen

En cliquant sur l'examen, vous pouvez lire le rapport ou la dictée et accéder à l'image en cliquant sur celle-ci. Le visionneur d'images est somme toute très semblable à InteleViewer.

#### **Profil**


La section **Profil** vous permet d'ajouter un deuxième courriel si vous travaillez, par exemple, en équipe avec un autre médecin ou un résident. L'onglet **Notifications** vous amène à cocher les options d'examens à afficher dans la section **Mes notifications** ainsi que l'avertissement par courriel pour tout changement coché.

#### **Notifications**

Selon les critères établis au **Profil**, tous les examens concernés vous sont envoyés dans la section **Mes notifications** formant ainsi une liste de travail. Vous pouvez alors les retrouver plus aisément au fur et à mesure qu'ils sont faits et que les rapports sont dictés.

### Extraire des images du DSQ

Accédez au DSQ en cliquant sur Archive externe à côté de la loupe de recherche. Entrez la RAMQ et téléchargez l'image pour l'ajouter à notre PACS en cliquant sur le nuage avec la flèche. Notez que les images de PDI et HMR n'apparaîtront pas, car elles sont déjà dans le PACS. Prévoyez au moins 10min.

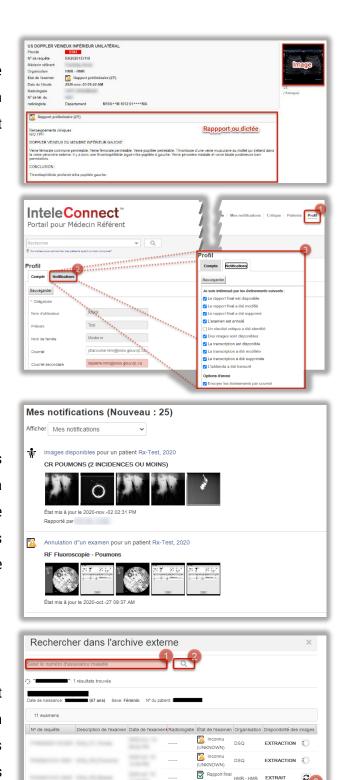

Pour toute question ou pour activer votre connexion, contactez Jean-Denis Lacourse à idlacourse.hmr@ssss.gouv.gc.ca.

LIGNE