

# Aide-mémoire : Planche AutoPulse

**1. TOUJOURS** faire le RCR manuellement lorsque la planche n'est pas en marche.



**2.** Appuyer sur ON/OFF pour mettre la planche en marche. S'assurer qu'il n'y ait que 2 lumières vertes d'allumées (*pas de lumière rouge*)




**3.** Soulever le patient à 30/45 degrés. Aligner le "O" de AutoPulse avec le pli inter fessier. Appuyer la planche sur les fesses du patient.


## Aide-mémoire : Planche AutoPulse (suite)




**4.** Coucher le patient sur la planche.  
S'assurer qu'il est bien positionné: la ligne jaune arrive sous les aisselles.

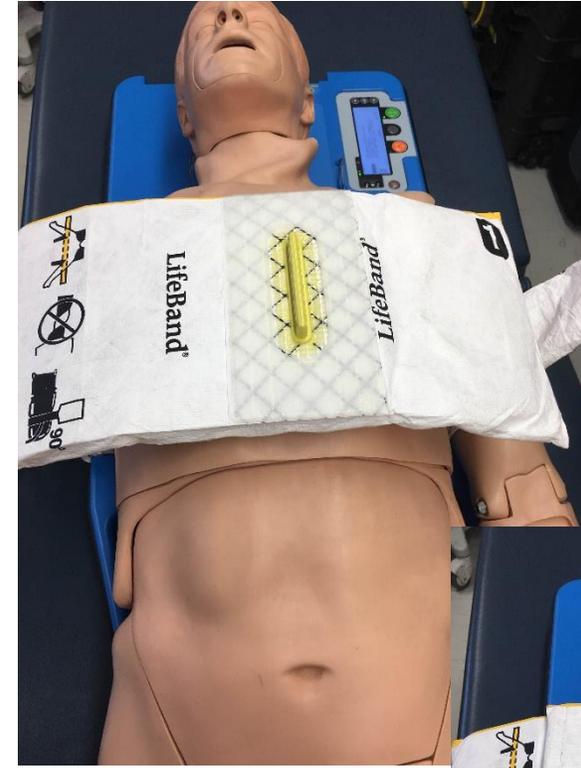

**5.** Refermer les bandes sur le thorax du patient.  
Suivre l'ordre indiqué sur les bandes (1 puis 2)  
S'assurer qu'elles soient bien droites  
(Bandes grises latérales à 90 degrés avec la planche)

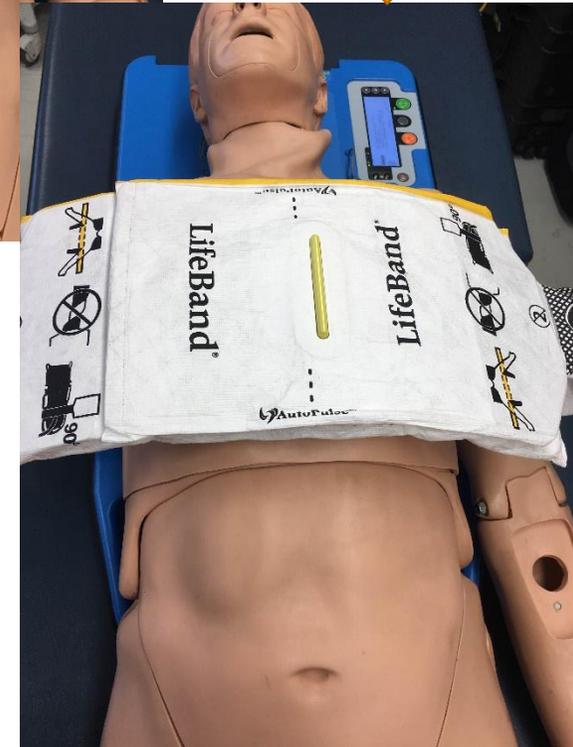

## Aide-mémoire : Planche AutoPulse (suite)

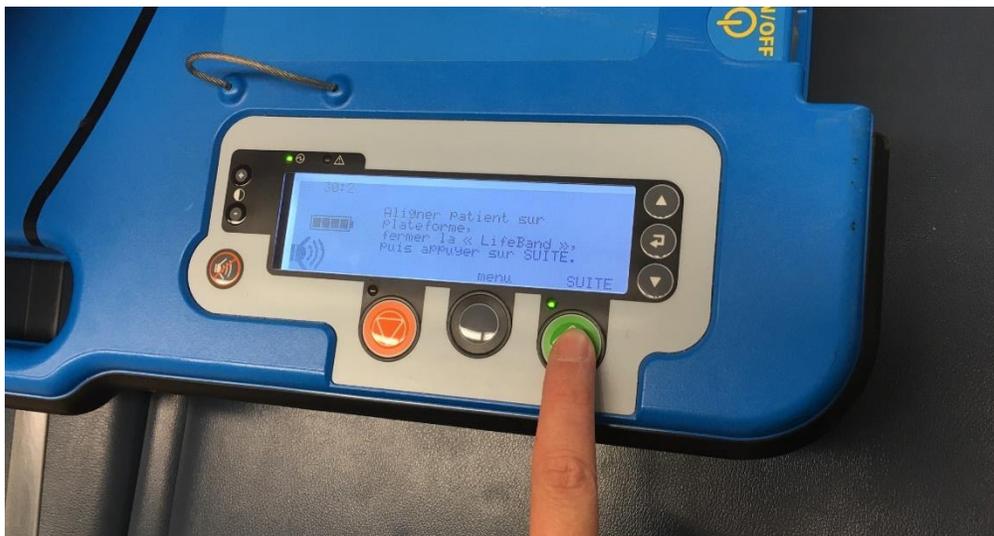


La planche se met automatiquement en mode 30:2  
*\*Après 30 compressions, un signal sonore se fait entendre pour aviser l'inhalothérapeute de donner les insufflations*



- 6.** Appuyer sur le bouton vert (START)  
Ne pas tenir les bandes  
Ne pas déposer les mains sur les bandes

*N.B. Les 4 premières compressions servent à ajuster la pression nécessaire pour bien masser le patient*

Pour passer au mode CONTINU (lorsque le patient est intubé), appuyer **2** fois sur le bouton gris

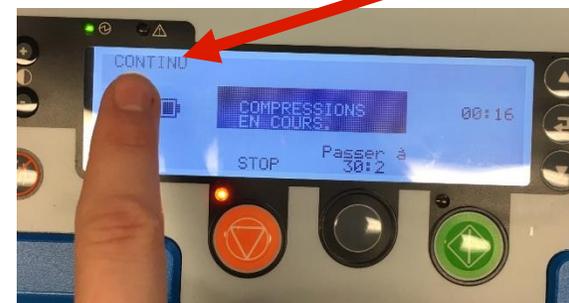

**Autonomie de la batterie:  
30 minutes**

## **Aide-mémoire : Planche AutoPulse CHANGEMENT DE LA BATTERIE**

4. Enlever la batterie de la planche et la remplacer par la batterie de recharge



1. Appuyer sur le bouton orange pour arrêter les compressions «Tasser» les bandes du thorax, et commencer le RCR manuel



2. Appuyer sur ON/OFF pour éteindre la planche



3. Retirer la clanche de sécurité qui bloque la batterie




5. Appuyer sur ON/OFF pour redémarrer la planche



8. Si vous étiez en mode "continu" avant de changer la batterie, appuyer 2 fois sur le bouton gris




7. Appuyer sur le bouton vert (Start)

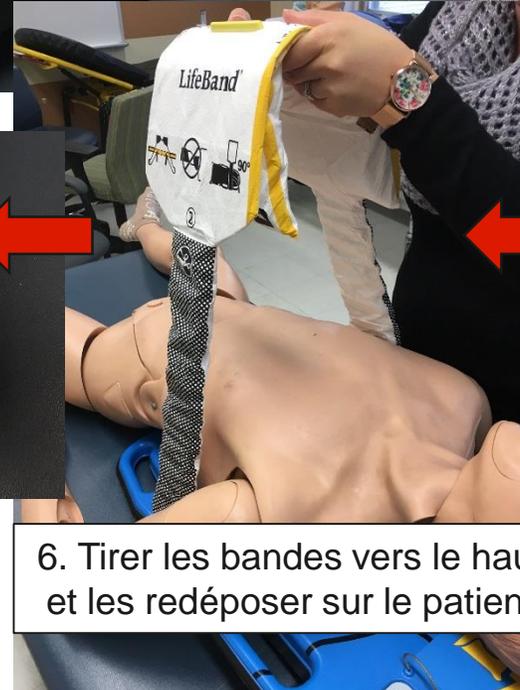

6. Tirer les bandes vers le haut et les redéposer sur le patient

# Aide-mémoire : Planche AutoPulse

## MESSAGES D'ALERTE

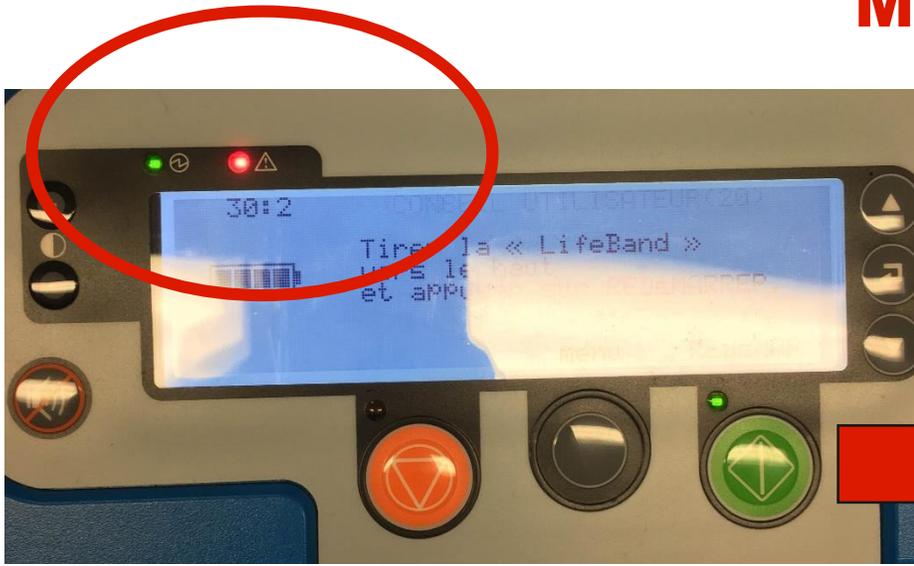

Si des messages de «CONSEILS UTILISATEUR» et «PANNES» s'affichent à l'écran:


1. Remonter les bandes vers le haut et les redéposer sur le patient.
2. Appuyer 2 fois sur Start pour redémarrer la planche.

Si le message indique «ERREUR SYSTÈME», la planche **n'est pas utilisable**. Recommencer le RCR Manuellement.


# Aide-mémoire : Planche AutoPulse

## CHANGEMENT DE LA BANDE

### METTRE LA BANDE DE COMPRESSION

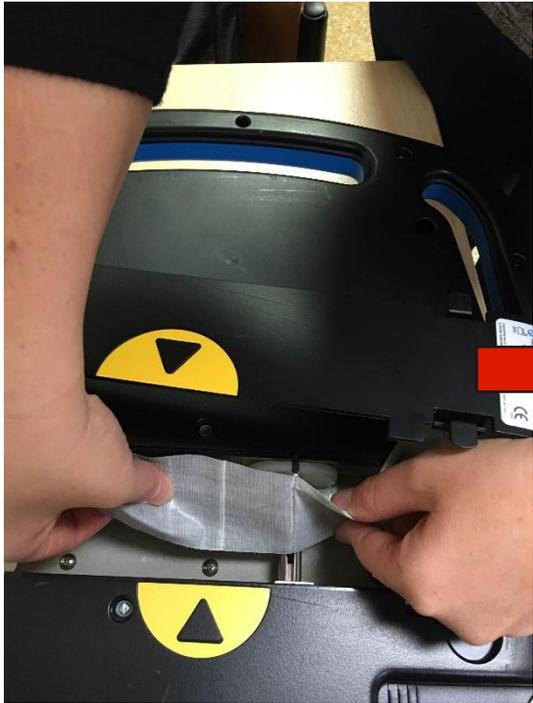

Insérer la petite clé en plastique dans l'endroit désigner au dos de la planche

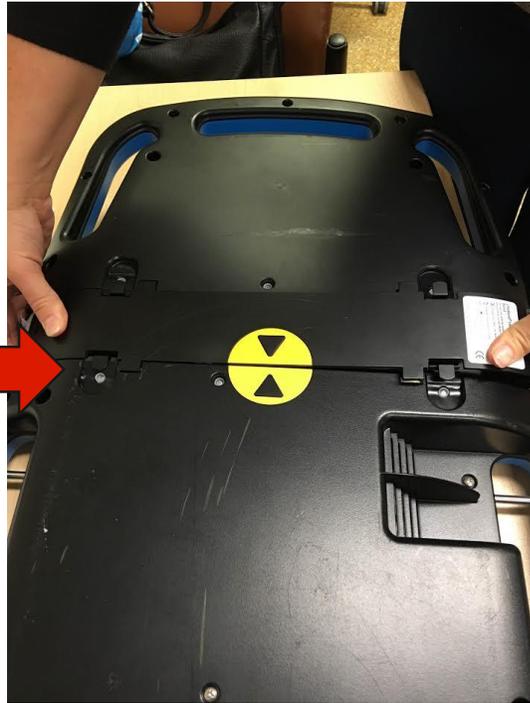

Aligner les deux flèches et «clipper» la bande à la planche

### ENLEVER LA BANDE DE COMPRESSION



Appuyer sur les 4 clenches pour «déclipper» la bande.



Pousser sur la partie blanche à l'intérieur pour délivrer la clé en plastique

La bande est à **usage unique**

La planche doit être toujours prête à utilisation (*donc, changer la bande en revenant du code et remettre une housse en plastique sur la planche*)