

Contention de type Pinel

Rappel:

-Placer Sangles noires vers le haut

-Fixer les sangles de contentions à l'endroit approprié

** endroit fixe , ne jamais fixer à la ridelle**

-Toujours utiliser les sangles latérales en plus des sangles principales

** empêche le patient de faire une rotation complète, risque de strangulation**

-Fixer solidement au lit



** la pression doit être assez forte pour exercer une dépression du matelas de chaque côté du lit **

-Aucune literie ne doit être entre la ceinture abdominale et l'usager

** seulement la jaquette**

-Doit avoir l'espace d'un doigt en l'usager et ceinture abdominale

-Toujours avoir une clé magnétique au chevet

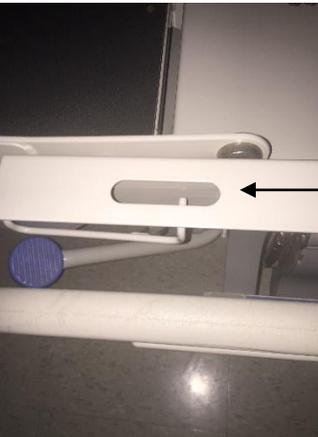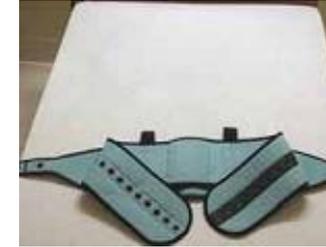

Ceinture abdominale magnétique classique ou détachable de marque PinelMD selon la taille de l'usager :

- Petite : tour de taille de 38-86 cm (17-38 pouces);
- Universelle : tour de taille de 53-112 cm (21-45 pouces);
- Rallonge : tour de taille supérieur à 112 cm (45 pouces).

Le règlement CA-013 de l'HMR prévoit que la décision d'installer une contention est une activité réservée aux infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et aux MD



- 1 étape :**
-Choisir la bonne taille
-Fixer les sangles principales a/n du lit




- La pression doit être assez forte pour exercer une dépression du matelas de chaque côté du lit.



2 étape : Attacher la ceinture abdominale

- La ceinture doit être centrée.
- Le bouton doit être placé vis-à-vis du nombril du patient.
- Doit avoir l'espace d'un doigt entre l'utilisateur et ceinture abdominale .
- Lorsque la ceinture est bien ajustée, resserrer d'un œillet.
- Réévaluer 15 min post-installation .Les premiers mouvements de l'utilisateur peuvent nécessiter un réajustement des sangles.
- Tirer sur les boutons pour s'assurer qu'ils sont bien enclenchés.

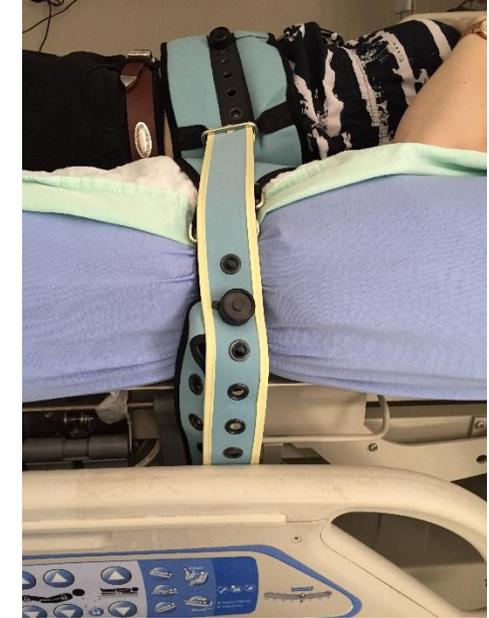

3 étape : Installer les sangles latérales



- Fixer chaque sangle latérale avec le bouton métallique qui est déjà en place sur la sangle principale
* Le bouton peut accueillir 4 épaisseurs maximum*


Contentions poignets

Rappel:


- Ajustez l'attache membre à l'aide du velcro. Vous devez être capable d'insérer un doigt
- Faire un double nœud au niveau du poignet
- Le nœud fait a/n de la structure fixe de lit doit être solide mais facilement détachable en situation d'urgence



Vous pouvez retrouver un exemple de nœud sur l'emballage des contentions jetables

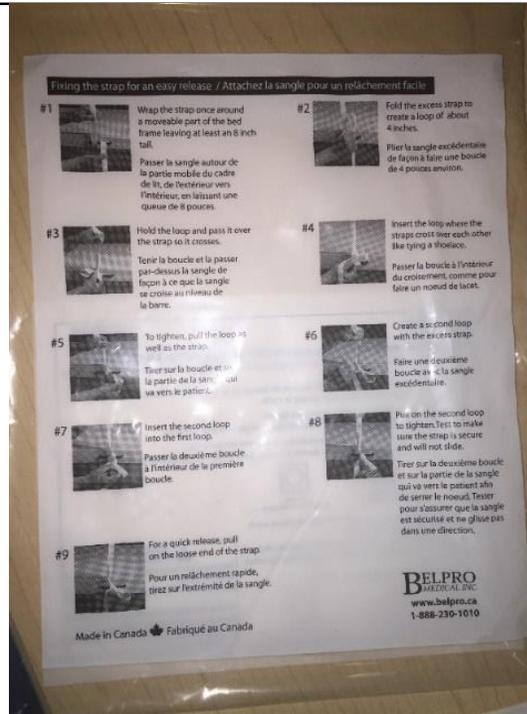

Ceinture pelvienne

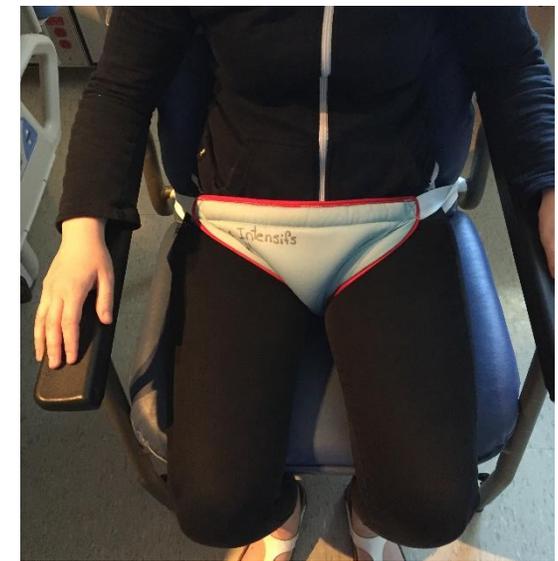

Étape 1:

-Choisir la ceinture en fonction de la taille de la personne

Rouge: Small->
poids pt 80-120lbs->grandeur poitrine 32-39 po

Jaune: Large->
poids pt 145-190 lbs-> grandeur poitrine 43-49 po

-Placer la ceinture pelvienne à plat de façon à ce que la partie la plus étroite soit près du dossier
-Attacher la sangle inférieure derrière le dossier, le plus droit possible.

Étape 2:

-Rabattre la ceinture pelvienne de façon à ce que la sangle supérieure passe au niveau de la taille de la personne (angle de 45 ° avec le siège)

-Faire un croisement avec la sangle inférieure pour bloquer les hanches.

De cette façon le patient ne peut se lever du fauteuil



Étape 3:

-Vérifier l'ajustement

La tension de la sangle supérieure devrait permettre de glisser seulement une main entre l'utilisateur et la ceinture