


Installation pansement Tégaderm IV Advanced sur CVC

1. Désinfecter selon technique.
2. Appliquer au besoin du Cavillon si diaphorèse ou problème d'adhérence.
3. *Laisser sécher 2 minutes.*

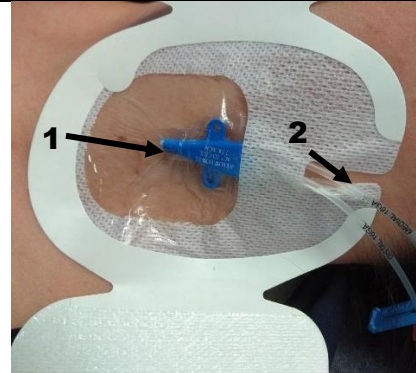


1. Centrer le site d'insertion dans la fenêtre transparente du pansement (max 1cm du bord)
Attention! Ne pas étirer le pansement avant de l'appliquer.
2. *Faire passer les voies du cathéter dans la petite ouverture.*
3. Appliquer **pression et chaleur** sur **TOUT** le pansement pour bien le faire adhérer, de l'intérieur vers l'extérieur.
4. Décoller les bandes de papier amovibles en maintenant **pression et chaleur** au fur et à mesure du retrait.




Pression et chaleur: C'est le secret de la bonne adhérence

Joindre légèrement les 2 sections sous le cathéter

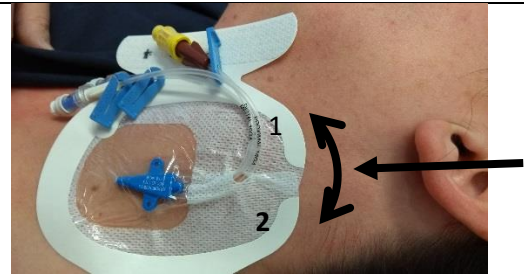

Appliquer la bande large amovible sous le cathéter

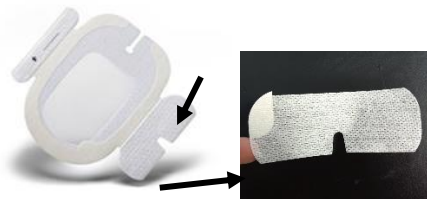

Noter la date de réfection du pansement sur la bande étroite amovible et appliquer sur le pansement en s'assurant de bien occlure le pansement

