

Installation pansement stabilisateur Tégaderm IV Advanced (1683) pour cathéter IV court NEXIVA



Installer le cathéter IV court NEXIVA



1- Installer le pansement stabilisateur Tégaderm IV Advanced (1683), en s'assurant d'aligner la rallonge avec l'ouverture du pansement et de mettre le site d'insertion au milieu de la fenêtre.



2- Prendre la large bande adhésive et la mettre par-dessus le pansement et la rallonge. Le pansement doit être totalement occlusif et recouvrir entièrement les ailettes.



3- Prendre la petite bande adhésive pour la date et fixer la rallonge

