


Aide mémoire : Papillon S/C BD saf-t-intima

Ailettes

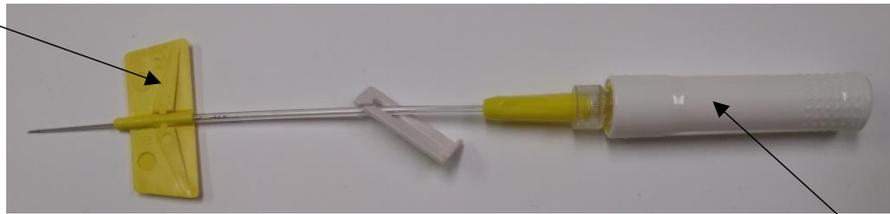

1- Il n'y a pas de vide d'air à faire.

2- Installer le papillon S/C selon la technique habituelle.

manchon de sécurité blanc



3- Maintenir les ailettes solidement à une main.

4- Tirer sur le manchon de sécurité blanc en ligne droite de manière continue jusqu'à ce que celui-ci se détache du mécanisme protecteur



Sans aiguille



5- Fixer avec une pellicule transparente (tegaderm).

6- Lors de l'administration de la **première dose uniquement** :

Prélever le médicament prescrit :

dose prescrite **+ 0.3 ml pour le vide de la tubulure**

Ex : Rx Dilaudid 1 mg s/c q 3h prn

Fiole de Dilaudid 2mg/ ml

Prélever 0.8 ml et l'injecter au patient

7- Pour les doses suivantes prélever et administrer au patient la dose précise :

Ex : Rx : Dilaudid 1 mg s/c q 3h prn

Fiole de Dilaudid 2mg/ ml

Le cathéter peut rester en place 7 jours maximum. Le retirer lors de l'apparition d'un ou des problèmes suivants : rougeur, douleur, induration, écoulement au site d'insertion, etc.

Prélever 0.5 ml et administrer au patient