



Le test du défibrillateur branché sur des électrodes n'est possible que si ce sont des électrodes de type **OneStep**

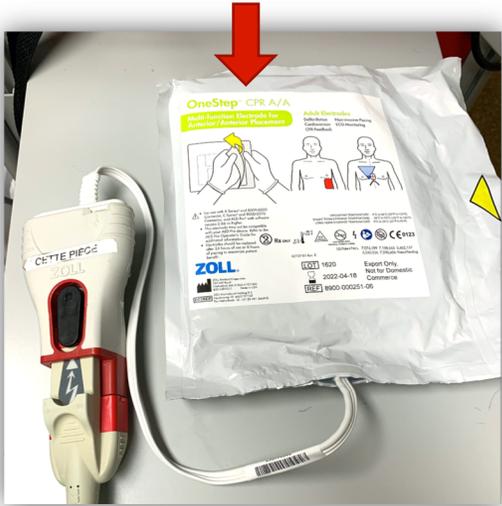

Lors des b/o des électrodes OneStep, nous avons des électrodes **StatPadz**. Il est impossible de faire le test de défibrillateur branché directement sur les électrodes



1. Défaire l'adaptateur du câble

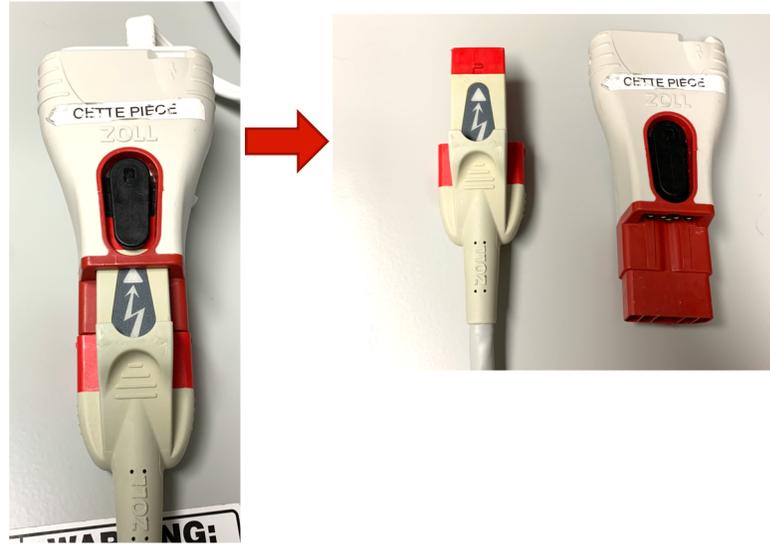

3. Brancher le câble dans le port et faire le test à 30 joules selon la méthode usuelle.



Test du défibrillateur sans électrodes

2. Sur le côté droit du défibrillateur, il y a un port «test à 30 joules»



4. Rebrancher les **StatPadz** 2 manières possibles, mais attention de **NE PAS PERDRE** l'adaptateur pour les OneStep!

