
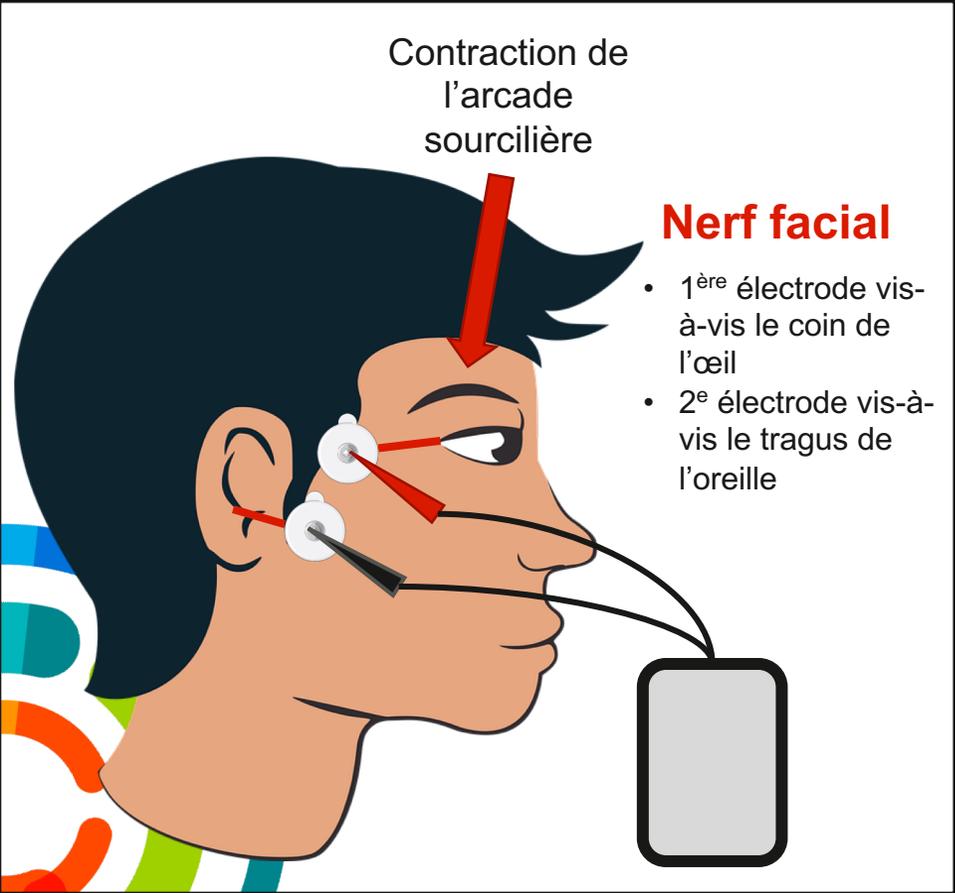


# Utilisation du Neurostimulateur *SunStim™ Plus*

Référence  
Wiegand, D. J. L.-M. H. (2017). *Aacn procedure for high-acuity, progressive, and critical care*. St. Louis, MO: Elsevier.  
Images  
Smart.servier.com  
pixabay.com

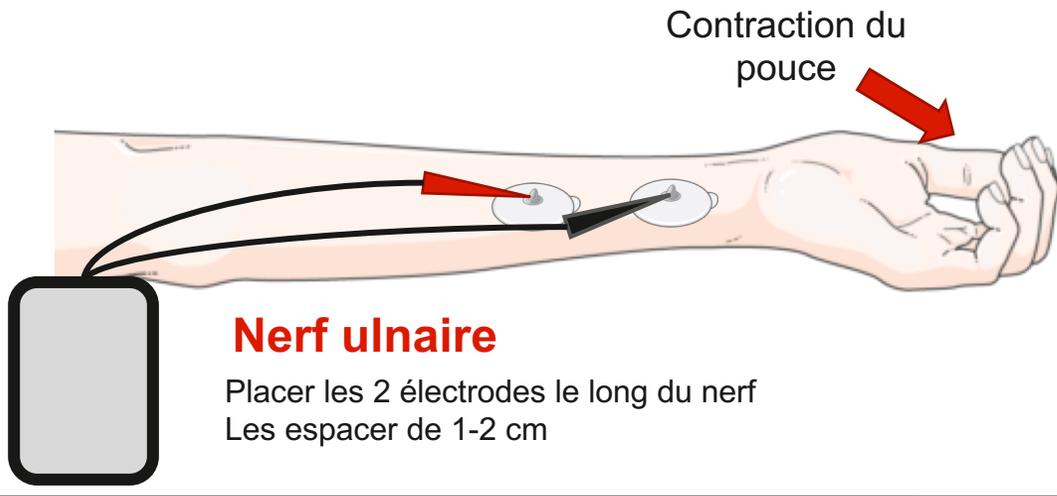

## Ouverture du Neurostimulateur

- Énergie de 0-70 mA. Une énergie de 10-20 mA est normalement adéquate.
- Chiffres indicateurs de 0-10 → pour atteindre 10-20mA, mettre en position **2-3**.

Si le patient est diabétique ou est connu pour une diminution de la sensibilité neuronale, augmenter l'énergie.

Électrode **rouge**: proximale  
Électrode **noire**: distale

## TOF (train of four)

- **Maintenir le bouton TOF enfoncé.** 4 influx seront générés.
- Observer le **pouce (nerf ulnaire)** ou **l'arcade sourcilière (nerf facial)** pour la présence de mouvement. On peut légèrement toucher la région pour déceler des mouvements.
- Noter le résultat de contraction / 4

\* Indicateur que les influx sont délivrés

\* Indicateur de la batterie

