

# REMARQUES IMPORTANTES

## PRISMAX version 3.x à 3.3

**Baxter**


### Alarmes Call service (Appeler maintenance) – Récupération du traitement en option



Si une erreur système se produit (système de contrôle) pendant le fonctionnement du PrismaMax, le PrismaMax affiche un écran Call service (Appeler maintenance).

Vous pouvez maintenant choisir d'essayer de récupérer le traitement.

#### 1. Notez le code d'erreur.

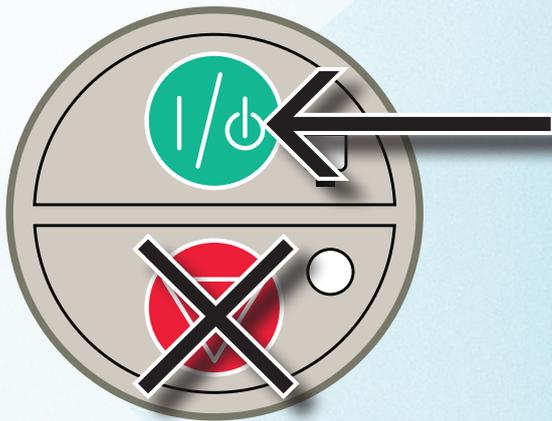

#### 2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt

- bouton vert sur le panneau de commande d'alimentation
- permet de démarrer le processus de récupération du traitement disponible en option.

#### 3. Après le redémarrage, un écran avec une alarme B2222 s'affiche.

Si le traitement peut être récupéré, la touche Continue (Continuer) est mise en surbrillance. Appuyez sur **Continue** (Continuer) pour récupérer le traitement en cours.

Si la récupération de traitement n'est pas disponible, appuyez sur **Discard Set** (Jeter le dispositif) pour arrêter le traitement et contactez le service de maintenance.



## PRISMAX version 3.x à 3.3

Alarmes Call service (Appeler maintenance) –  
Récupération automatique du traitement

Si une erreur système se produit (système de sécurité) pendant le fonctionnement du PrisMax, le PrisMax redémarre automatiquement.

**1. Pendant le redémarrage,**

le PrisMax affiche un écran noir, le haut-parleur d'alarme émet un signal sonore et les LED des **boutons vert** et **rouge** du panneau de commande d'alimentation clignotent.

**2. N'appuyez en aucun cas sur le bouton vert pendant le processus.**

Le son de l'alarme peut être coupé en appuyant sur le **bouton rouge**, mais ne le maintenez pas enfoncé.

Le redémarrage peut prendre jusqu'à 1 minute.

**3. Une fois le redémarrage terminé,**  
un écran de notification « System Error » (Erreur système) s'affiche, proposant 2 options :

Si le traitement peut être récupéré, la touche Continue (Continuer) est mise en surbrillance. Appuyez sur **Continue** (Continuer) pour récupérer le traitement en cours.

Si la récupération de traitement n'est pas disponible, appuyez sur **Discard Set** (Jeter le dispositif) pour arrêter le traitement et contactez le service de maintenance.

