

# NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE BAS NIVEAU DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL

Répertoire des fiches CIUSSS-EMTL

COORDINATION DE LA PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES INFECTIONS  
DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS

Mars 2025



Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Est-de-  
l'Île-de-Montréal

Québec 

# **NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE BAS NIVEAU DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL**

Coordination de la prévention et de contrôle des infections

# Table des matières

Préambule.....	2
Définitions et légendes .....	3
Description d'utilisation d'une fiche.....	4
STÉTHOSCOPE .....	5
CABARET PORTATIF POUR PRÉLÈMENT-PANSEMENT .....	6
BASSIN DÉDIÉ (LAVER LES USAGERS) .....	7
GLUCOMÈTRE.....	8
GUITARE (LAVE TÊTE).....	9
ASPIRATEUR GOMCO .....	10
BAIN .....	11
FAUTEUIL ROULANT DÉDIÉ (ÉLECTRIQUE OU MANUEL) .....	12
PLANCHE DE TRANSFERT .....	13
CHARIOT À COLLATION .....	14
CHAISE D'AISANCE .....	15
POMPE VOLUMÉTRIQUE NOVUM .....	16
POMPE VOLUMÉTRIQUE AGILIA.....	17
POUSSE-SERINGUE.....	18
THERMOMÈTRE TYMPANIQUE .....	19
VEINVIEWER.....	20
Tableau de suivi des mises à jour .....	21
Annexe 1- Liste de fiches de nettoyage et désinfection en élaboration .....	22

## Préambule

Le présent document est complémentaire à la procédure sur le nettoyage et désinfection de bas niveau de l'équipement médical. Il a pour but de regrouper l'ensemble des outils mis en place nommés « fiches de nettoyage et désinfection ».

Les fiches organisationnelles ont été élaborées dans l'objectif d'assurer une harmonisation dans les étapes de nettoyage et désinfection des équipements médicaux au point de service. Chaque équipement cité dans ce document contient sa fiche avec les étapes associées.

Également, un gabarit vierge de fiche a été conçu pour des équipements médicaux qui seraient davantage spécifiques à un secteur. Ce gabarit pourrait être utilisé par les gestionnaires afin de démontrer les étapes requises associées pour cet équipement.

Par ailleurs, tous les équipements médicaux doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure en vigueur, même s'ils ne sont pas regroupés dans ce document intégrateur, y compris tous les équipements prêtés, empruntés et loués qui doivent également être nettoyés et désinfectés après son utilisation.

## Définitions et légendes

**Équipement médical** : Appareil, dispositif ou matériel médical **non invasif** qui n'entrent en contact qu'avec la peau intacte d'une personne. Le nettoyage et la désinfection de bas niveau de ces équipements permettent de réduire au minimum la contamination croisée entre le souillé et le propre et ainsi diminuer le risque de transmission des infections nosocomiales.

**Nettoyage** : Processus qui consiste à enlever les saletés, les souillures visibles. Le nettoyage est essentiel pour une désinfection efficace.

**Désinfection** : Processus qui consiste à détruire la majorité des micro-organismes.


**Temps de contact** : Durée nécessaire d'un produit chimique à agir sur une surface pour une désinfection optimale.


- Le fait de laisser le produit agir, pendant la durée déterminée, accroît son action
- Dans le cas de non-respect du temps de contact, le produit n'élimine pas adéquatement les agents pathogènes
- Le temps de contact doit être identifié par le fabricant du produit et visible

**Point de service** : Endroit où il y a interaction entre l'utilisateur et le travailleur de la santé.


- Au moment de l'activité pratiquée par le travailleur au point de service, une évaluation du risque infectieux s'applique en permanence, dans tous les milieux de soins lors de contact avec l'utilisateur ou l'environnement.
- Les travailleurs doivent évaluer le risque d'exposition à des liquides biologiques, à de la peau endommagée, puis déterminer les stratégies qui atténueront ce risque et préviendront la transmission de micro-organismes.


**Utilisateur de l'unité**: Tous les travailleurs de la santé, les stagiaires et les médecins qui manipulent des équipements médicaux au point de service.

**High touch** : Surfaces à potentiel élevé de contamination susceptibles d'entrer en contact avec l'utilisateur ou fréquemment touchées. Représentées par un rond rose foncé dans les fiches 

**Low touch** : Surfaces à faible potentiel de contamination susceptibles d'entrer en contact avec l'utilisateur ou moins touchées. Représentées par un rond vert dans les fiches 

**Précautions additionnelles** : Lors de précautions additionnelles, se référer aux [affiches](#) et aux [documents de référence](#) selon le pathogène et qui précisent les produits désinfectants à utiliser.

Représentées par un rond rose pâle dans les fiches 

**Indicateur de propreté** : Un seul indicateur a été sélectionné pour l'instant, pour la chaise d'aisance, compte tenu des risques de contamination. L'indicateur de propreté doit être apposé à la fin du processus de désinfection. Il sera retiré à la prochaine utilisation. Représenté par un rond bleu dans la fiche. 

## Description d'utilisation d'une fiche

Pour chaque fiche organisationnelle, vous allez retrouver :

### LES RESPONSABILITÉS

- Précision de fréquence pour chaque surface  
**High touch** ● **Low touch** ● **Précautions additionnelles** ●

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	HYGIÈNE ET SALUBRITÉ		
Entre chaque usager	Quotidien	Hebdomadaire	Terminal

### FOURNITURES REQUISES ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) REQUIS

- Nom du produit nettoyant/désinfectant
- Mention de respect du temps de contact

FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Produit (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> </ul>	Exemples : Gants /Blouse à manches longues

### LIEU DU NETTOYAGE/DÉSINFECTION ET DES PARTICULARITÉS :

- S'il y a des particularités associées à la procédure, il y aura une précision


LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
Ex.: Chambre, utilité souillée, corridor	Ex. : Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail)

### LES ÉTAPES REQUISES ET VISUEL (En cas de précautions additionnelles, certaines étapes supplémentaires seront précisées par une pastille ●)

ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants ● <b>Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</b> 1. Étape 2. Étape	
Retirer l'ÉPI et procéder à l'hygiène des mains ● <b>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection</b> 3. Étape	
Si précautions additionnelles: valider le produit nécessaire	

# STÉTHOSCOPE

## STÉTHOSCOPE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tampons d'alcool (recommandation du fabricant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>À la sortie de la chambre</li> </ul>	Lorsque dédié à la chambre avec précautions additionnelles, nettoyer et désinfecter également à la fin de l'isolement. Prioriser un stéthoscope jetable lorsque possible.
ÉTAPES	VISUEL <i>*Valide pour tous les modèles</i>
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter (Utiliser plusieurs tampons d'alcool pour procéder à la désinfection)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Les oreillettes</li> <li>L'acoustique</li> <li>Le corps du stéthoscope</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p><i>* Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</i></p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection _001

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# CABARET PORTATIF POUR PRÉLÈMENT-PANSEMENT

## CABARET PORTATIF POUR PRÉLÈVEMENT – PANSEMENT

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Une fois par semaine l'extérieur et l'intérieur des compartiments ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>À la sortie de la chambre</li> </ul>	<p><b>Ne pas apporter dans une chambre avec précautions additionnelles</b></p> <p>Attribution requise pour la désinfection hebdomadaire (registre ou plan de travail)</p>
ÉTAPES	VISUEL* Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Les poignées</li> <li>Les côtés et ensuite le dessous</li> <li>Nettoyer l'intérieur des compartiments (<u>une fois par semaine</u>)</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_002

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles



## BASSIN DÉDIÉ (LAVER LES USAGERS)

### BASSIN DÉDIÉ (LAVER LES USAGERS)

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Entre chaque utilisation ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre</li> </ul>	Ranger dans la chambre, dans un lieu propre désigné ou dans l'utilité propre après désinfection
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>L'extérieur et l'intérieur du bassin</li> <li>Ranger dans la chambre, dans un lieu propre désigné ou dans l'utilité propre après désinfection</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p>Suivre la procédure du milieu lors du départ de l'utilisateur pour l'entreposage</p>	
Date de mise à jour : 2025-01-09	Fiche de nettoyage et désinfection_003

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# GLUCOMÈTRE

## GLUCOMÈTRE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Hebdomadaire base et coffret ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> <li><b>Tampon d'alcool</b> : lecteur de code-barres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>À la sortie de la chambre</li> </ul>	<p><b>Tenir l'appareil en position horizontale lors d'un nettoyage afin d'éviter que le liquide ne contamine le port d'entrée de la bandelette</b></p> <p>Attribution requise pour la désinfection hebdomadaire (registre ou plan de travail).</p>
ÉTAPES	VISUEL* Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toute les surfaces du glucomètre avec la lingette de peroxyde</li> <li>Lecteur de code-barres (<b>tampon d'alcool</b>)</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_004

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# GUITARE (LAVE TÊTE)

## GUITARE (LAVE-TÊTE)

<b>UTILISATEUR DE L'UNITÉ</b>	
Entre chaque utilisation ●	
<b>FOURNITURES REQUISES</b>	<b>ÉPI REQUIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gants</li> </ul>
<b>LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION</b>	<b>PARTICULARITÉS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la chambre</li> <li>• Dans l'utilité souillée</li> </ul>	Entreposer dans l'utilité propre
<b>ÉTAPES</b>	<b>VISUEL</b>
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le sceau et le pot</li> <li>2. L'intérieur et l'extérieure de la guitare</li> <li>3. Ranger dans l'utilité propre après désinfection</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p><b>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection</b></p> <p><i>* Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</i></p>	<p><i>*Valide pour tous les modèles</i></p> 
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection _006

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# ASPIRATEUR GOMCO


## ASPIRATEUR GOMCO

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Une fois par mois ● ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> <li>Si besoin, blouse à manches longues (selon procédure)</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre</li> <li>Dans l'utilité souillée</li> </ul>	Entreposer dans l'utilité propre (lorsque pas utilisé) Attribution requise pour la désinfection mensuelle ( <u>registre</u> ou plan de travail)
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants ● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter 1. Le dessus et les contours de l'appareil 2. La surface du panneau principal et les boutons Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains ● Si précautions additionnelles, ajout de désinfection 4. La plateforme 5. Les roues 6. Ranger dans l'utilité propre après une désinfection terminale * Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_007

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# BAIN

## BAIN

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque bain <span style="color: #e91e63;">●</span>	Une fois par mois <span style="color: #e91e63;">●</span> <span style="color: #00c853;">●</span>
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Linge enduit de peroxyde d'hydrogène accéléré (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Local (salle de bain)</li> </ul>	<p>Cette procédure doit être appliquée et respectée même pour les appareils munis d'un cycle de désinfection intégré. <b>Se référer à l'aide-mémoire disponible.</b></p> <p>Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail)</p>
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p><span style="color: #e91e63;">●</span> <b>1<sup>er</sup> : Dans l'ordre, nettoyer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Les robinets et contrôle d'eau</li> <li>Les surfaces intérieures du bain</li> <li>Les barres d'appui ou équipements (si présentes)</li> <li>Rincer</li> </ol> <p><b>2<sup>e</sup> : Dans l'ordre, désinfecter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Répéter les étapes de 1 à 4</li> <li>Laisser le produit agir selon le temps de contact inscrit sur le contenant</li> <li>Rincer</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-11	Fiche de nettoyage et désinfection _008

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
Pastille verte : surfaces low touch  
Pastille rose pâle : précautions additionnelles

## FAUTEUIL ROULANT DÉDIÉ (ÉLECTRIQUE OU MANUEL)

### FAUTEUIL ROULANT DÉDIÉ (ÉLECTRIQUE OU MANUEL)

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Si souillé <span style="color: red;">●</span> <span style="color: green;">●</span>	Une fois par mois <span style="color: red;">●</span> <span style="color: green;">●</span> Désinfection complète du fauteuil roulant
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Si très souillé : utiliser des linges en microfibre et du peroxyde d'hydrogène prêt à l'emploi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la chambre ou autre local désigné</li> </ul>	Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail) : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Désinfection complète du fauteuil roulant (suivre la procédure interne pour la désinfection des housses et accessoires amovibles)</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL *Valide pour tous les modèles
Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants <span style="color: red;">●</span> <b>Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les poignées</li> <li>2. L'appui-tête (si présent)</li> <li>3. Le dossier</li> <li>4. Le siège</li> <li>5. Les appui-bras et les manettes (si présentes)</li> </ol> Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis <span style="color: red;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <b>Une fois par mois</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivre les étapes 1 à 5 et ajout des surfaces low touch</li> </ul>	
Date de mise à jour : 2025-01-28	Fiche de nettoyage et désinfection_009

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# PLANCHE DE TRANSFERT


## PLANCHE DE TRANSFERT

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque utilisation ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le corridor</li> </ul>	
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <p>1. Les deux surfaces de la planche</p> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection avec les produits recommandés</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-11	Fiche de nettoyage et désinfection_010

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# CHARIOT À COLLATION

## CHARIOT À COLLATION


RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Après chaque quart si souillé ●	Une fois par mois ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le corridor</li> <li>À l'endroit désigné</li> </ul>	<p>Nettoyer toute souillure visible immédiatement</p> <p>Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail)</p>
ÉTAPES	VISUEL* Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le dessus des tablettes du chariot (du haut vers le bas)</li> <li>Les poignées</li> <li>Les tiges du haut vers le bas</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-11	Fiche de nettoyage et désinfection_011

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles



# CHAISE D'AISANCE

## CHAISE D'AISANCE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
Lorsque souillure ●	Quotidien ●      Terminale ●●●
FOURNITURES REQUISES	ÉPIREQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> <li>Indicateur de propreté (code GRM : 45-1696)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> <li>Blouse à manches longues si risque d'éclaboussures sur les vêtements</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans l'utilité souillée ou dans la chambre (selon le milieu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Indicateur de propreté</b> : Se glisse autour de la lunette. Si impossible à insérer autour de la lunette, accrocher à l'appui-bras.</li> <li><b>Important :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Toujours utiliser un sac hygiénique</b></li> <li>● <b>Ne jamais verser de liquide biologique dans un lavabo.</b></li> </ul> </li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants. (Blouse à manches longues si risque d'éclaboussures sur les vêtements).</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les poignées de transport</li> <li>2. Le dossier</li> <li>3. Les appui-bras</li> <li>4. Le siège</li> <li>5. La bassine, si présente sur la chaise</li> </ol> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis.</p> <p>Retirer l'ÉPI et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>●● <b>Désinfection terminale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Suivre les étapes 1 à 5 et ajout des quatre pattes</li> </ol> <p>● <b>Après désinfection terminale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Installer un <b>indicateur de propreté</b></li> <li>8. Déplacer la chaise dans l'utilité propre ou l'endroit désigné</li> </ol>	
Date de mise à jour : 2025-01-28	Fiche de nettoyage et désinfection_012

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille bleue : indicateur de propreté

# POMPE VOLUMÉTRIQUE NOVUM

## POMPE VOLUMÉTRIQUE NOVUM

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillée <span style="color: #e91e63;">●</span>	Entre chaque usager <span style="color: #e91e63;">●</span> <span style="color: #4db6ac;">●</span>
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingettes de peroxyde d'hydrogène</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre</li> </ul>	<p><b>Placer la pompe dans sa position horizontale avec la porte fermée avant de nettoyer et désinfecter.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisée)</li> </ul> </li> <li>Attribution requise (registre ou plan de travail)</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p><span style="color: #e91e63;">●</span> Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tous les contours de la pompe</li> <li>Le clavier et les rainures des doigts</li> <li>Le canal de chargement de la tubulure</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p><span style="color: #e91e63;">●</span> <span style="color: #4db6ac;">●</span> Lorsque les étapes 1 à 3 sont terminées et que la porte est ouverte :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le dessous de la pompe</li> <li>Délicatement, toute la surface interne</li> <li>Le cordon d'alimentation électrique (<b>ne pas nettoyer les broches</b>)</li> </ol>	 
Date de mise à jour : 2025-01-10	Fiche de nettoyage et désinfection_013

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
Pastille verte : surfaces low touch

# POMPE VOLUMÉTRIQUE AGILIA


## POMPE VOLUMÉTRIQUE AGILIA

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillée ●	Entre chaque usager ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingettes de peroxyde d'hydrogène</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre</li> </ul>	<p><b>Placer la pompe dans sa position horizontale avec la porte fermée avant de nettoyer et désinfecter.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisée)</li> </ul> </li> <li>Attribution requise (registre ou plan de travail)</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tous les contours du boîtier</li> <li>Le clavier</li> <li>La porte et le levier de la porte</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p>● ● Lorsque les étapes 1 à 3 sont terminées :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Les côtés et le dessous de la pompe :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>En nettoyant à l'arrière : <b>ne pas mouiller l'ouverture du cordon d'alimentation</b></li> </ul> </li> <li>Lorsque la porte est ouverte : <b>Délicatement</b>, la surface interne (guides-tubulures, pince bleue)</li> <li>La poignée argentée (à l'arrière) et les accessoires de la pompe</li> <li>Le cordon d'alimentation électrique (<b>ne pas nettoyer les broches</b>)</li> </ol>	
Date de mise à jour : 2025-01-29	Fiche de nettoyage et désinfection_014

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
Pastille verte : surfaces low touch

# POUSSE-SERINGUE

## POUSSE-SERINGUE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillé <span style="color: #e91e63;">●</span>	Entre chaque usager <span style="color: #e91e63;">●</span> <span style="color: #00bcd4;">●</span>
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisé)</li> </ul> </li> <li>Attribution requise (registre ou plan de travail)</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p><span style="color: #e91e63;">●</span> Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le levier du bras poussoir</li> <li>La pince</li> <li>La surface avec les touches</li> <li>Toutes les surfaces exposées du boîtier</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p><span style="color: #00bcd4;">●</span></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le dessous et le cordon d'alimentation électrique</li> </ol>	
Date de mise à jour : 2025-01-09	Fiche de nettoyage et désinfection_015

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# THERMOMÈTRE TYMPANIQUE

## THERMOMÈTRE TYMPANIQUE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Entre chaque usager <span style="color: #e91e63;">●</span>	Hebdomadaire : boîtier de rangement <span style="color: #4db6ac;">●</span>
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tampon d'alcool</b> : lentille de la sonde et sonde</li> <li>• Lingettes de peroxyde d'hydrogène : Thermomètre et boîtier de rangement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À la sortie de la chambre</li> <li>• Au poste de soins</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour nettoyer la lentille et la sonde, utiliser seulement le <b>tampon d'alcool</b> en tout temps. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les autres produits de nettoyage risquent d'endommager la lentille et la sonde</li> </ul> </li> <li>• Attribution requise (registre ou plan de travail).</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p><span style="color: #e91e63;">●</span> Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <p><span style="color: #e91e63;">1</span>. Si souillure, <b>délicatement</b> : la lentille de la sonde et la sonde (<b>tampon d'alcool</b>)</p> <p><span style="color: #e91e63;">2</span>. Les contours du thermomètre</p> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p><b>Si précautions additionnelles : Ne pas utiliser le thermomètre tympanique</b></p> <p>Alternatives :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermomètre jetable en papier</li> <li>• Thermomètre numérique jetable unipatient</li> </ul> <p><span style="color: #4db6ac;">●</span> Si disponible :</p> <p><span style="color: #e91e63;">3</span>. Boîtier de rangement</p> <p>Date de mise à jour : 2025-01-15</p>	 <p>Fiche de nettoyage et désinfection_016</p>

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
Pastille verte : surfaces low touch  
Pastille rose pâle : précautions additionnelles

# VEINVIEWER

## VEINVIEWER

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
● Entre chaque usager	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tampon d'alcool</b> : lentille</li> <li>• <b>Lingette Caviwipes</b> (recommandation du fabricant). Respecter le temps de contact de 2 minutes (Code GRM: 2000025304)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À la sortie de la chambre</li> </ul>	
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boîtier</li> <li>2. Toutes les touches et la poignée</li> <li>3. Si souillure, délicatement : la lentille (<b>tampon d'alcool</b>)</li> </ol> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection avec les produits recommandés</p>	
Date de mise à jour : 2025-01-09	Fiche de nettoyage et désinfection_017

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles

## Tableau de suivi des mises à jour

Date	Nature*	Fiche	Commentaires
2024-06-07	A	Fiche 001	STÉTHOSCOPE
2024-06-07	A	Fiche 002	CABARET PORTATIF POUR PRÉLÈVEMENT-PANSEMENT
2025-01-09		Fiche 003	BASSIN DÉDIÉ (LAVÉ LES USAGERS)
2024-06-07	A	Fiche 004	GLUCOMÈTRE
2024-06-07	A	Fiche 006	GUITARE (LAVE-TÊTE)
2024-06-07	A	Fiche 007	ASPIRATEUR GOMCO
2024-06-11	A	Fiche 008	BAIN
2025-01-28		Fiche 009	FAUTEUIL ROULANT DÉDIÉ (ÉLECTRIQUE OU MANUEL)
2024-06-11	A	Fiche 010	PLANCHE DE TRANSFERT
2024-06-11	A	Fiche 011	CHARIOT À COLLATION
2025-01-28	A	Fiche 012	CHAISE D'AISANCE
2025-01-10-		Fiche 013	POMPE VOLUMÉTRIQUE NOVUM
2025-01-29		Fiche 014	POMPE VOLUMÉTRIQUE AGILIA
2025-01-09		Fiche 015	POUSSE-SERINGUE
2025-01-15		Fiche 016	THERMOMÈTRE TYMPANIQUE
2025-01-09		Fiche 017	VEIN VIEWER

\*Ajout (A), Modification (M). Destruction (D)

## Annexe 1- Liste de fiches de nettoyage et désinfection en élaboration

Appareil à pression mobile	Fauteuil roulant partagé (non électrique)
Chaise pèse-personne	Accessoire de marche
Chariot à médicament	Cabaret à pansement et prélèvement mobile
Lève personne mobile	Bladder scan
Ophtalmoscope/otoscope	Pèse-personne fixe
ECG mobile	Échelle service alimentaire de l'unité
Télémétrie	Pompe d'alimentation entérale
Bilirubinomètre (BBM)	Concentrateur
Doppler	Bonbonne d'oxygène
Poids, ballons d'exercices, coussins (réadaptation)	Table d'examen
Urinal	Haricot
Chariot lingerie – poubelle	



**Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Est-de-  
l'Île-de-Montréal**

**Québec** 