

ASPIRATEUR GOMCO

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Une fois par mois ● ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) 	<ul style="list-style-type: none"> Gants Si besoin, blouse à manches longues (selon procédure)
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Dans la chambre Dans l'utilité souillée 	Entreposer dans l'utilité propre (lorsque pas utilisé) Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail)
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Le dessus et les contours de l'appareil La surface du panneau principal et les boutons <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>● Si précautions additionnelles, ajout de désinfection</p> <ol style="list-style-type: none"> La plateforme Les roues Ranger dans l'utilité propre après une désinfection terminale <p>* Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_007