


BAIN

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque bain ●	Une fois par mois ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Linge enduit de peroxyde d'hydrogène accéléré (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Local (salle de bain) 	<p>Cette procédure doit être appliquée et respectée même pour les appareils munis d'un cycle de désinfection intégré. Se référer à l'aide-mémoire disponible.</p> <p>Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail)</p>
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● 1^{er} : Dans l'ordre, nettoyer</p> <ol style="list-style-type: none"> Les robinets et contrôle d'eau Les surfaces intérieures du bain Les barres d'appui ou équipements (si présentes) Rincer <p>2^e : Dans l'ordre, désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Répéter les étapes de 1 à 4 Laisser le produit agir selon le temps de contact inscrit sur le contenant Rincer <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-11	Fiche de nettoyage et désinfection _008