


CABARET PORTATIF POUR PRÉLÈVEMENT – PANSEMENT

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Une fois par semaine l'extérieur et l'intérieur des compartiments ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> À la sortie de la chambre 	<p>Ne pas amener dans une chambre avec précautions additionnelles</p> <p>Attribution requise pour la désinfection hebdomadaire (registre ou plan de travail)</p>
ÉTAPES	VISUEL* Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Les poignées Les côtés et ensuite le dessous Nettoyer l'intérieur des compartiments (<u>une fois par semaine</u>) <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_002

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch
 Pastille verte : surfaces low touch
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles