


CHAISE D'AISANCE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
Lorsque souillure ●	Quotidien ● Terminale ●●●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> • Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) • Indicateur de propreté (code GRM : 45-1696) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gants • Blouse à manches longues si risque d'éclaboussures sur les vêtements
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> • Dans l'utilité souillée ou dans la chambre (selon le milieu) 	<p>● Indicateur de propreté : Se glisse autour de la lunette. Si impossible à insérer autour de la lunette, accrocher à l'appui-bras.</p> <p>Important :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toujours utiliser un sac hygiénique • Ne jamais verser de liquide biologique dans un lavabo.
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants. (Blouse à manches longues si risque d'éclaboussures sur les vêtements).</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les poignées de transport 2. Le dossier 3. Les appui-bras 4. Le siège 5. La bassine, si présente sur la chaise <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis.</p> <p>Retirer l'ÉPI et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>●● Désinfection terminale</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Suivre les étapes 1 à 5 et ajout des quatre pattes <p>● Après désinfection terminale</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Installer un indicateur de propreté 8. Déplacer la chaise dans l'utilité propre ou l'endroit désigné 	
Date de mise à jour : 2025-01-28	Fiche de nettoyage et désinfection_012