

## FAUTEUIL ROULANT DÉDIÉ (ÉLECTRIQUE OU MANUEL)

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Si souillé ●●	Une fois par mois ●● Désinfection complète du fauteuil roulant
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>) <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si très souillé</b> : utiliser des linges en microfibre et du peroxyde d'hydrogène prêt à l'emploi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la chambre ou autre local désigné</li> </ul>	Attribution requise pour la désinfection mensuelle (registre ou plan de travail) : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Désinfection complète du fauteuil roulant</b> (suivre la procédure interne pour la désinfection des housses et accessoires amovibles)</li> </ul>
ÉTAPES	VISUEL *Valide pour tous les modèles
Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants ● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter <ol style="list-style-type: none"> <li>Les poignées</li> <li>L'appui-tête (si présent)</li> <li>Le dossier</li> <li>Le siège</li> <li>Les appui-bras et les manettes (si présentes)</li> </ol> Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains <b>Si précautions additionnelles</b> , valider le désinfectant requis ●● Une fois par mois <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivre les étapes 1 à 5 et ajout des surfaces low touch</li> </ul>	
Date de mise à jour : <b>2025-01-28</b>	Fiche de nettoyage et désinfection_009

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles