

GLUCOMÈTRE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	Hebdomadaire base et coffret ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) Tampon d'alcool : lecteur de code-barres 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> À la sortie de la chambre 	<p>Tenir l'appareil en position horizontale lors d'un nettoyage afin d'éviter que le liquide ne contamine le port d'entrée de la bandelette</p> <p>Attribution requise pour la désinfection hebdomadaire (registre ou plan de travail).</p>
ÉTAPES	VISUEL* Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Toute les surfaces du glucomètre avec la lingette de peroxyde Lecteur de code-barres (tampon d'alcool) <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection_004

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch
 Pastille verte : surfaces low touch
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles