

GUITARE (LAVE-TÊTE)

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque utilisation ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingette de peroxyde d'hydrogène (respecter le temps de contact inscrit sur le contenant) 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Dans la chambre Dans l'utilité souillée 	Entreposer dans l'utilité propre
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Le sceau et le pot L'intérieur et l'extérieure de la guitare Ranger dans l'utilité propre après désinfection <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection</p> <p><i>* Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</i></p>	<p><i>*Valide pour tous les modèles</i></p> 
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection _006