

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES BAINS/DOUCHES ET DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS LORS DES SOINS D'HYGIÈNE

1. Principes généraux

Afin de prévenir la transmission des infections, assurer des soins de qualité et sécuritaires à notre clientèle, cette procédure d'entretien des baignoires et autres équipements utilisés lors des soins d'hygiène, permet d'assurer une désinfection de faible niveau entre chaque usager.

2. Objectifs

- Effectuer un nettoyage et une désinfection adéquate, de manière à éviter la transmission des infections nosocomiales ou de germes pathogènes;
- Respecter les étapes d'un nettoyage et d'une désinfection efficace;
- Utiliser le produit recommandé et respecter les temps de contact requis.

3. Procédure à appliquer après chaque bain donné aux résidents/patients/usagers

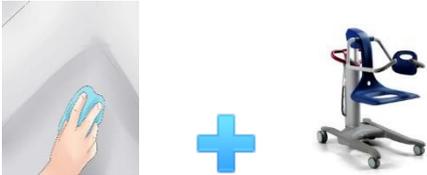
Cette procédure doit être appliquée et respectée même pour les appareils munis d'un cycle de désinfection intégré.

Nettoyage	Désinfection
<p>Le nettoyage précède <u>toujours</u> la désinfection afin d'éliminer tous les résidus présents</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mettre des gants à usage unique.2. Port de la blouse à manches longues si présence de matières organiques (selles) et/ou risque d'éclaboussure.3. Vidanger le bain.4. Afin d'éliminer les matières organiques, frotter toutes les surfaces, intérieures du bain et tous les équipements¹ ayant été utilisés avec un linge enduit du peroxyde d'hydrogène accéléré². Ex : dessus et dessous de chaise etc.5. Rincer abondamment les surfaces.	<p>Désinfection de faible niveau</p> <ol style="list-style-type: none">6. Frotter à nouveau toutes les surfaces intérieures du bain et tous les équipements¹ ayant été utilisés avec un linge enduit du peroxyde d'hydrogène accéléré². Ex : dessus et dessous de chaise etc.7. Laisser agir le produit selon les recommandations du fabricant.8. Rincer abondamment les surfaces.9. Procéder à l'hygiène des mains.
<p>Après le dernier bain de la journée</p> <ul style="list-style-type: none">• Retirer toutes enveloppes de protection des équipements, le cas échéant, et laver à la machine• Procéder à l'hygiène des mains	
<p>¹Équipement soins d'hygiène : Chaise de bain, coussin, sangle, civière douche etc. ²Produit recommandé par le service de prévention des infections. Exemple : Oxivir Tb. Vérifier date de péremption.</p>	

*Recto, procédure imagée

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES BAINS/DOUCHES ET DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS LORS DES SOINS D'HYGIÈNE

NETTOYER

			
<ul style="list-style-type: none"> • Mettre des gants à usage unique • Port de la blouse à manches longues si présence de matières organiques (selles) et/ou risque d'éclaboussure <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">Vidanger le bain</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Frotter avec un linge enduit de peroxyde d'hydrogène accéléré² :</p> <ul style="list-style-type: none"> • toutes les surfaces du bain; • les équipements¹ ayant été utilisés. <p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Rincer abondamment les surfaces</p> <p style="text-align: center;">4</p>

DÉSINFECTER

			
<p>Frotter à nouveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • toutes les surfaces intérieures du bain • tous les équipements¹ ayant été utilisés avec un linge enduit de peroxyde d'hydrogène accéléré². <p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">Laisser agir le produit selon les recommandations du fabricant.</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">Rincer abondamment les surfaces.</p> <p style="text-align: center;">7</p>	<p style="text-align: center;">Procéder à l'hygiène des mains.</p> <p style="text-align: center;">8</p>

Cette procédure doit être appliquée et respectée même pour les appareils munis d'un cycle de désinfection intégré.