

## PLANCHE DE TRANSFERT

UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque utilisation ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingette de peroxyde d'hydrogène (<b>respecter le temps de contact inscrit sur le contenant</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gants</li> </ul>
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le corridor</li> </ul>	
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● <b>Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</b></p> <p>1. Les deux surfaces de la planche</p> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p><b>Si précautions additionnelles</b>, ajout de désinfection avec les produits recommandés</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-11	Fiche de nettoyage et désinfection_010

Légende : Pastille rose foncé : surfaces high touch  
 Pastille verte : surfaces low touch  
 Pastille rose pâle : précautions additionnelles