


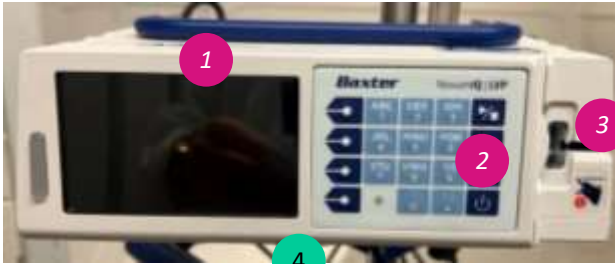

POMPE VOLUMÉTRIQUE NOVUM

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillée ●	Entre chaque usager ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingettes de peroxyde d'hydrogène 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Dans la chambre 	<p>Placer la pompe dans sa position horizontale avec la porte fermée avant de nettoyer et désinfecter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné. <ul style="list-style-type: none"> Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisée) Attribution requise (registre ou plan de travail)
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Tous les contours de la pompe Le clavier et les rainures des doigts Le canal de chargement de la tubulure <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p>● ● Lorsque les étapes 1 à 3 sont terminées et que la porte est ouverte :</p> <ol style="list-style-type: none"> Le dessous de la pompe Délicatement, toute la surface interne Le cordon d'alimentation électrique (ne pas nettoyer les broches) 	  
Date de mise à jour : 2025-01-10	Fiche de nettoyage et désinfection_013