

POMPE VOLUMÉTRIQUE AGILIA

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillée ●	Entre chaque usager ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Lingettes de peroxyde d'hydrogène 	<ul style="list-style-type: none"> Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Dans la chambre 	<p>Placer la pompe dans sa position horizontale avec la porte fermée avant de nettoyer et désinfecter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné. <ul style="list-style-type: none"> Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisée) Attribution requise (registre ou plan de travail)
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> Tous les contours du boîtier Le clavier La porte et le levier de la porte <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p>● ● Lorsque les étapes 1 à 3 sont terminées :</p> <ol style="list-style-type: none"> Les côtés et le dessous de la pompe : <ul style="list-style-type: none"> En nettoyant à l'arrière : ne pas mouiller l'ouverture du cordon d'alimentation Lorsque la porte est ouverte : Délicatement, la surface interne (guides-tubulures, pince bleue) La poignée argentée (à l'arrière) et les accessoires de la pompe Le cordon d'alimentation électrique (ne pas nettoyer les broches) 	<p>Le diagramme visuel illustre les étapes de nettoyage et désinfection de la pompe Agilia. Les numéros 1 à 7 sont placés sur des images de la pompe et ses composants. Les pastilles roses (1, 2, 3) indiquent les surfaces high touch, et les pastilles vertes (4, 5, 6, 7) indiquent les surfaces low touch. Les images montrent la pompe dans sa position horizontale, le clavier, la porte, les côtés et le dessous, la surface interne de la porte ouverte, la poignée argentée, et le cordon d'alimentation électrique.</p>
Date de mise à jour : 2025-01-29	Fiche de nettoyage et désinfection_014