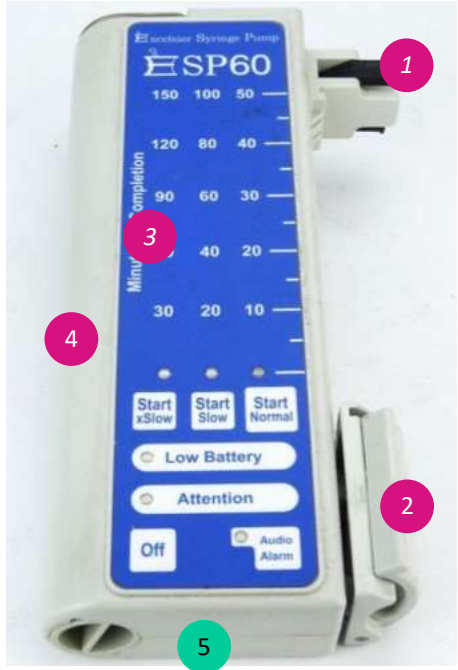


POUSSE-SERINGUE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Quotidiennement et si souillé ●	Entre chaque usager ● ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> • Lingette de peroxyde d'hydrogène 	<ul style="list-style-type: none"> • Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> • Dans la chambre 	<ul style="list-style-type: none"> • Après une désinfection, déplacer dans l'endroit propre désigné. <ul style="list-style-type: none"> ○ Désinfection hebdomadaire (lorsque non utilisé) • Attribution requise (registre ou plan de travail)
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le levier du bras pousoir 2. La pince 3. La surface avec les touches 4. Toutes les surfaces exposées du boîtier <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p> <p>●</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Le dessous et le cordon d'alimentation électrique 	
Date de mise à jour : 2025-01-09	Fiche de nettoyage et désinfection_015