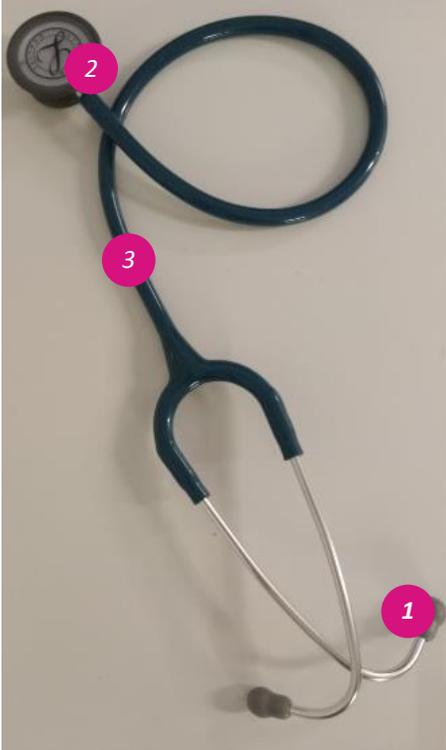


STÉTHOSCOPE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR DE L'UNITÉ	
Entre chaque usager ●	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> ● Tampons d'alcool (recommandation du fabricant) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> ● À la sortie de la chambre 	Lorsque dédié à la chambre avec précautions additionnelles, nettoyer et désinfecter également à la fin de l'isolement. Prioriser un stéthoscope jetable lorsque possible.
ÉTAPES	VISUEL *Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter (Utiliser plusieurs tampons d'alcool pour procéder à la désinfection)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les oreillettes 2. L'acoustique 3. Le corps du stéthoscope <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>* Si précautions additionnelles, valider le désinfectant requis</p>	
Date de mise à jour : 2024-06-07	Fiche de nettoyage et désinfection _001