


THERMOMÈTRE TYMPANIQUE

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
Entre chaque usager ●	Hebdomadaire : boîtier de rangement ●
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> ● Tampon d'alcool : lentille de la sonde et sonde ● Lingettes de peroxyde d'hydrogène : Thermomètre et boîtier de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> ● À la sortie de la chambre ● Au poste de soins 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour nettoyer la lentille et la sonde, utiliser seulement le tampon d'alcool en tout temps. <ul style="list-style-type: none"> ○ Les autres produits de nettoyage risquent d'endommager la lentille et la sonde ● Attribution requise (registre ou plan de travail).
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <p>1. Si souillure, délicatement : la lentille de la sonde et la sonde (tampon d'alcool)</p> <p>2. Les contours du thermomètre</p> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles : Ne pas utiliser le thermomètre tympanique</p> <p>Alternatives :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Thermomètre jetable en papier ● Thermomètre numérique jetable unipatient <p>● Si disponible :</p> <p>3. Boîtier de boîte de rangement</p> <p>Date de mise à jour : 2025-01-15</p>	
	Fiche de nettoyage et désinfection_016