

VEINVIEWER

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
● Entre chaque usager	
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> ● Tampon d'alcool : lentille ● Lingette Caviwipes (recommandation du fabricant). Respecter le temps de contact de 2 minutes (Code GRM: 2000025304) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gants
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> ● À la sortie de la chambre 	
ÉTAPES	VISUEL * Valide pour tous les modèles
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>● Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boîtier 2. Toutes les touches et la poignée 3. Si souillure, délicatement : la lentille (tampon d'alcool) <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection avec les produits recommandés</p>	
Date de mise à jour : 2025-01-09	Fiche de nettoyage et désinfection_017